



DURAFIBER

En sterk geldannende fiberbandasje
som enkelt fjernes i ett stykke¹

 **smith&nephew**
DURAFIBER[®]
Geldannende fiberbandasje

DURAFIBER[®]

DURAFIBER er en høyabsorberende, 100 % nonwoven, geldannende bandasje. DURAFIBER består av en sammensetning av spesifikt modifiserte cellulosefibre, og tilbyr en allsidig løsning på behandling av middels til svært eksuderende sår.



1 Danner et mykt, bindekräftig gelomslag¹

Danner et mykt, bindekräftig gelomslag ved kontakt med sårveske.

- Omslutter sårsegen perfekt.²
- Gir et optimalt fuktig sårtilhelingsmiljø.
- Reduserer steder i såret der bakterier kan formere seg.³

2 Stenger væske og bakterier inne^{1, 2, 4, 5}

Bandasjefibrene sveller og danner gel når de absorberer væske, og stenger eksudat og eventuelle patogene bakterier inne i bandasjen.^{1, 2, 4, 5}

- Bidrar til å fjerne overflødig væske og bakterier vekk fra sårsegen på en trygg måte.^{1, 2, 4, 5}
- Reduserer risikoen for maserasjon i omkringliggende vev.⁵
- Kan redusere risikoen for kryssforurensing ved fjerning.^{1, 2, 4}

3 Vertikal absorpsjon og kontrollert lateral væskebevegelse^{2, 5}

Stengefunksjonen kontrollerer effektivt lateral spredning av væske.^{2, 5}

- Reduserer risikoen for maserasjon rundt såret, fremmer tilheling.

4 Bevarer form og gelstyrke^{1, 2}

- Holder formen når den er våt slik at det er enklere å fjerne den i ett stykke.^{1, 2}
- Reduserer risikoen for bandasjerester.^{1, 2}
- Kan gi raskere, mer komfortable bandasjeskift.

5 Høy absorpsjonskapasitet^{1, 2}

- Gir optimal væskehåndtering.^{1, 2, 6}
- Bidrar til å redusere lekkasjerisikoen, for bedre pasientkomfort.
- Kan brukes i opptil 7 dager.

6 Minimal bandasjekrumping¹

- Vedvarende dekning av sårsegen.^{1, 2, 3}
- Effektiv væskehåndtering over hele såroverflaten.
- Økt effektivitet siden det kreves færre bandasjer.

Hvordan fungerer DURAFIBER?



Før påføring.



Danner en gel ved kontakt med eksudat.



Stenger inne sårveske og eventuelle skadelige bakterier.

Bruksområder:

Til håndtering av kroniske og akutte sår, sår med hel tykkelse, delvis tykkelse eller grunne, granulerende, væskende sår. For eksempel: Bensår, trykksår, diabetiske sår, operasjonssår, sår som skal tilheles uten å sys; donorsteder, tunnelerende sår og fistelsår, brannsår med delvis tykkelse, sårskader og sår som har en tendens til å blø.

Bruksanvisning:

Sett bandasjen på såret og la den overlapp 1 cm over huden rundt såret. Fest DURAFIBER med en fuktighetsbevarende bandasje (f.eks. ALLEVYN/OPSITE). Når DURAFIBER-remse brukes i dype kavitetssår, settes den på i ett stykke. La det være minst 2,5 cm utenfor såret for enkel gjenåpning. Dekk dype sår løselig, ca. 85 %, siden DURAFIBER-bandasjen vil utvides og fylle sårbandasjen ved kontakt med sårveske.

DURAFIBER[®] sterk gelfiberbandasje



Smith & Nephew AS
Avd. for avansert sårbehandling
Nye Vaks vei 64
1395 HVALSTAD

T (+47) 66 84 20 20
F (+47) 66 84 20 90
www.smith-nephew.com/wound

[®] varemerke for Smith & Nephew
^{*} Alle varemerker er anerkjent
© Smith & Nephew oktober 2012
21930-2

Bestillingsinformasjon

Varenummer	Bandasje	Størrelse	Pakning
66800559		5cm x 5cm	10
66800560		10cm x 10cm	10
66800561		15cm x 15cm	5
66800551		10cm x 12cm	10
66800546		4cm x 10cm	5
66800547		4cm x 20cm	5
66800548		4cm x 30cm	5
66800563		2cm x 45cm	5

Referanser:

Alle referanser er in vitro tester (ekskl. ref. 7)

1. Smith and Nephew Report – DS/10.056.R1 05 2010 DURAFIBER Dressing Physical Properties
2. DS/11/187/DOF Testing performed as part of DURAFIBER photoshoot
3. Smith and Nephew Research Centre Review Report: RR-WMP06290-40-01 The potential for proliferation of bacteria in wound exudate
4. Smith and Nephew Wound Management Data on File 1004001 April 2010 Visual Demonstration of sequestration of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in a DURAFIBER dressing using confocal microscopy
5. Smith and Nephew Report – DS/10/013/R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties
6. Smith and Nephew Report – DS/10/013/R1 02 2010 Aquacel Dressing Physical Properties
7. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MED Ltd, 2007.