

Vi introduserer

“SECURA No-Sting
Barrier Film” det nye
navnet på NO-STING
SKIN-PREP[®]

 **smith&nephew**
SECURA[®]
NO-STING
BARRIER FILM
Skin Protectant

En flytende filmdannende
hudbeskyttelse som ikke svir



SECURA[®] No-Sting Barrier Film er en flytende filmdannende hudbeskyttelse som ikke svir

SECURA No-Sting Barrier Film

- Tørker hurtig, på under 30 sekunder.^{1,2}
- Ikke-irriterende^{3,4} alkoholfri formula som reduserer risiko for svie på ødelagt hud.^{4,5}
- Latex-, parfyme- og konserveringsfri formula.^{4,6}
- Effektiv barriere på opptil 96 timer (4 dager).⁷

Tilgjengelig i 3 valgfrie sterile formater:

- Spray - praktisk og enkel i bruk. Hver flaske inneholder i gjennomsnitt 235 sprays⁸
- Lollipop - applikator for å sikre ren og presis applikering
- Serviett - gir et kostnadseffektivt format

Beskytter hud

Beskytter intakt og ødelagt hud fra irritasjon som skyldes.^{7,9}

- Urin- og fæces inkontinens
- Kroppsvæsker
- Traume fra limstoffer
- Friksjon

Den beskytter også hudens fra traume når tape og limstoffer skal fjernes.⁹

Kan brukes på fullbårne barn fra 1 måneds alder.

Vanntett, pustende og gjennomsliktig barriere.

Med en gang produktet påføres gir den filmdannende hudbeskyttelsen en effektiv vanntett⁷ og pustende barriere. Den er klar og fargeløs og gir konstant innsyn til huden og til det perifere sårområdet.

Forlenger tiden bandasjer kan ligge på sår

SECURA No-Sting Barrier Film kan øke tiden som bandasjen ligger på sår* fordi den gir effektiv barriere og beskyttende grensesnitt som hjelper å forberede hudområder som utsettes for dreneringstuber, eksterne katetere, hudområder rundt stomier og andre klebende bandasjer. Den kan brukes sammen med lignende typer limstoff og akrylat.

*Følg fremgangsmåten som følger produktet.

Enkel å påføre og fjerne

Påføres enkelt på vanskelige områder som albuer, knær og heler. Etter påføring følger den naturlig kroppens bevegelser og hverken sprekker opp eller flasser av.

Fjernes enkelt ved hjelp av plasterfjerner.

Bestillingsinformasjon

Produkt nr.	Beskrivelse	Kartong	Kartong/Eske
66800710	SECURA No-Sting Barrier Film spray	1 28ml/flaske	12
66800787	SECURA No-Sting Barrier Film lollipop	5 3ml lollipop	20
66800788	SECURA No-Sting Barrier Film lollipop	25 3ml lollipop	4
66800711	SECURA No-Sting Barrier Film lollipop	50 3ml lollipop	12
66800789	SECURA No-Sting Barrier Film lollipop	5 1ml lollipop	20
66800790	SECURA No-Sting Barrier Film lollipop	25 1ml lollipop	4
66800712	SECURA No-Sting Barrier Film serviett	50 1ml servietter	20



Referanser

1. Time-To-Dry Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
2. Tactile Characterization (Stickiness) Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
3. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09-129700-111, Hilltop Research, 2010.
4. Formulations: SECURA No-Sting Barrier Film Spray and SECURA No-Sting Barrier Film Wipe/Swab
5. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 09-60, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
6. Odor Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
7. Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
8. No-Sting Barrier Spray Mean Spray Content Test. SAP 2010.
9. Skin Protectant Barrier Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

Wound Management
Smith & Nephew
Nye Vaks vei 64
1395 Hvalstad
Norge

www.smith-nephew.com

®Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew November 2012
12-11214-NO

T +47 66 84 20 20
F +47 66 84 20 90