



 **smith&nephew**

DERMAPAD[◇]

Polymer Gel Pad

DERMAPAD* är en unik geldyna speciellt framtagen för att minska risken för skador orsakade av tryck^{1,2}

DERMAPAD^{◊*} är kliniskt bevisad att vara effektivt trycksårs-förebyggande genom att omfördela tryck från utsatta områden.³

DERMAPAD är indicerad för användning på intakt hud och kan användas på:

- Patienter med trycksår av grad 1 för att hjälpa till att minska risken för försämring och hjälpa vävnadens återuppbyggnad²
- Patienter med nyligen läkta trycksår för att förhindra uppkomst av nya⁴
- Patienter som anses ha större risk för att utveckla trycksår eller tryckrelaterad vävnadsskada¹

Egenskaper och fördelar

- ✓ Områden som riskerar eller visar tecken på att utveckla hudskada²
- ✓ 1:a gradens trycksår för att förhindra försämring och hjälpa vävnadens återuppbyggnad⁴
- ✓ Nyligen läkta trycksår för att förhindra nya¹

Appliceringsguide

- ✓ Välj lämplig storlek/form från sortimentet
- ✓ Ta ut produkten från förpackningen
- ✓ Försäkra er om att området är helt torrt. Applicera direkt på det skadad eller utsatta området. Båda sidorna på Dermalpad kan appliceras mot huden (förutom hälvarianten)
- ✓ Vid behov kan dynan fästas med silikontejp eller tubbandage
- ✓ Huden under dynan skall regelbundet inspekteras enligt lokala kliniska riktlinjer.
- ✓ Dynan kan tvättas med tvål och vatten för att återanvändas på samma patient. Dynan måste vara torr innan den appliceras igen.
- ✓ När den inte används skall DERMADAD förvaras i sin plastförpackning



Kontraindikationer

Använd inte på skadad hud. Placera ej över näsa och mun.

Applicera inte DERMADAD över förband då detta kan påverka förbandets andningsförmåga och även de tryckfördelande egenskaperna hos DERMADAD.

Avbryt användningen av DERMADAD omedelbart om djup vävnadsskada misstänks/konstateras eller att sår uppkommit.



Strip

Sheet

Sacrum

Heel

Försiktighetsåtgärder

Om en hudreaktion uppstår eller huden verkar försämrats avbryt användning och kontakta läkare.

Försiktighet bör vidtas om DERMADAD kommer i kontakt med icke färgäkta tyg då det finns riska för färgöverföring.

*DERMAPAD varumärke i UK är ADERMA[®]. Där det refereras till DERMADAD är det data vid användning av ADERMA som använts.

Referenser

1. Leonard S. An evaluation of shaped dermal pad and their influence on the incidence of pressure ulcers in an acute NHS Foundation Trust. 2008. Luton and Dunstable Hospital.
2. Hampton S, Tadej M, Young S. An evaluation of Aderma Heel Pad. 2010. Wound Healing Centre, Eastbourne.
3. Product claim report CCA2109R2b.
4. Technical study report; CCA2109/R2b Evidence to support the pressure re-distribution claim for ADERMA. Nichola Grayson

For patients. For budgets. For today.[◊]

Wound Management
Smith & Nephew
Box 143
431 22 Mölndal, Sverige
T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31

www.smith-nephew.com/wound

[◊]Varumärke från Smith & Nephew
[™]Alla varumärken tillhör
© Smith & Nephew August 2013
13-08057-SE



Licensed by Eucomed