

Prevention
is the cure

DERMAPAD*

Utformet for å forebygge mot trykksår^{1,2,3,4}

smith&nephew

DERMAPAD[◊]

Polymer Gel Pad

DERMAPAD kan brukes på:



Tidlige tegn på trykkskade



Under apparater for å forebygge mot skade



Nylig tilhelede trykksår



Områder som er utsatt for trykkskader



Bestillingskoder

S&N produktnr.	Beskrivelse	Antall stk. pr. kartong	Antall kartonger pr. eske
66801315	DERMAPAD Ark 10x10x0.3cm	5	12
66801316	DERMAPAD Ark 10x10x1.2cm	5	12
66801317	DERMAPAD Ark 20x20x0.3cm	2	10
66801318	DERMAPAD Ark 20x20x1.2cm	2	6
66801319	DERMAPAD Hæl	2	12
66801320	DERMAPAD Large Hæl	2	12
66801322	DERMAPAD Sacrum/Ankel stropp	1	10
66801323	DERMAPAD Strip 50x2.5x0.3cm	5	12
66801324	DERMAPAD Strip 30x5x0.3cm	5	12

DERMAPAD^{ox} applikasjonsguide



Brukes kun på intakt hud



Kan klippes i med saks³



Kan holdes på plass med sekundær silikon fikseringsstape



Kan vaskes og brukes på nytt på èn og samme pasient⁴



Behold esken for å opprettholde praktisk oppbevaring



Hæl - Hælproduktet kan brukes med den lange siden på tvers over foten for stillesittende pasienter, eller med den lange siden på tvers over hælen for sengeliggende pasienter. Det kan også benyttes på albuer og knær. En stor variant er tilgjengelig for områder med hevelse og/eller opphopning av væske.



Sacrum - Opprinnelig utformet for sakrum-området fordi denne fasongen holdes på plass med bleier (inkontinens) eller undertøy. Annen vanlig praksis inkluderer bruk på ankel, rundt skuldre, på hoften eller på baksiden av hodet.



Ark - Arkene er svært allsidige og kan brukes under føttene eller hodet under hvile, mellom kneet eller under haken. De kan brukes enten flatt eller brettet for håndfrakturer. Dette gjør produktet ideelt til bruk under rehabilitering for slagpasienter. De store arkene kan brukes til å brette rundt foten eller under skulderen når pasienten ligger.



Strips - Strips'ene er ideelle for mer vanskelige områder som mellom fingre og tær, bak ørene eller over nesen under ansiktsmasker. Den brede strips'en er hyppig brukt nedover ryggraden.



*DERMAPAD har merkenavnet ADERMA[®] i UK. Der Dermapad har oppgitt referanse, er dataene generert ved bruk av ADERMA.

Referanser

1. Fletcher J ADERMA Range A flexible way to prevent pressure ulcers Wounds UK-2009 54136-9.pdf.
2. Leonard S 2008 .pdf.
3. Test report CCA2109 R2a.pdf.
4. Technical study report CCA2109 R3.pdf.

Wound Management
Smith & Nephew AS
Nye Vakås vei 64
P.O.Box 224
1379 Nesbru, Norge
T +47 66 84 20 20
F +47 66 84 20 90

www.smith-nephew.com/wound

[®]Varemerket tilhører Smith & Nephew
[™]All trademarks acknowledged
© Smith & Nephew August 2013
13-08060-NO