




## PICO<sup>◇</sup> 7-system

### Hurtigveiledning

[smith-nephew.com/pico](http://smith-nephew.com/pico)

 **smith&nephew**  
**PICO<sup>◇</sup> 7**


Sårbehandlingssystem med  
negativt trykk for engangsbruk

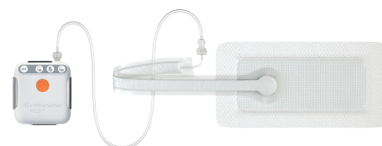

Supporting healthcare professionals

# PICO<sup>◇</sup> 7

## Banebrytende teknologi

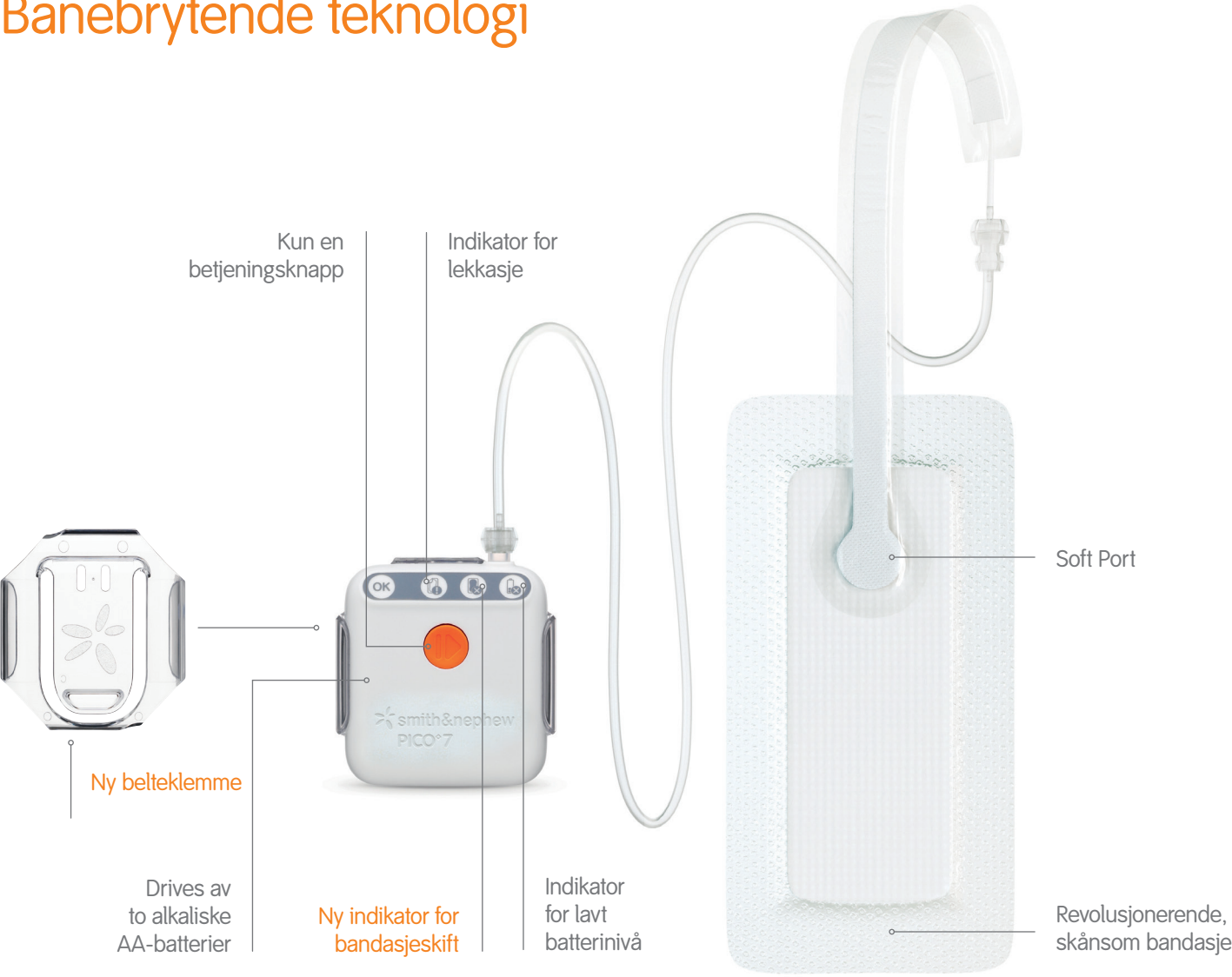

### Den beste PICO vi noensinne har laget

#### Pumpens yteevne

PICO-pumpen håndterer luftlekkasjer mer enn dobbelt så effektivt som sin forgjenger.<sup>1</sup> Denne kraftig forbedrede effektiviteten kan støtte helsepersonell ved å levere negativt trykk, og kan potensielt brukes på problematiske steder der det er vanskelig å forsegle.

#### Brukervennlighet

- Nytt brukergrensesnitt med en indikator for full bandasje som optimerer bandasjeskift
- Område for å skrive dato for behandlingsstart på pumpen, gir bedre kontroll/oversikt.

#### Fleksibilitet

Flerpakninger med fem bandasjer er nå tilgjengelige og gjør det mulig å skreddersy behandlingen til pasientenes kliniske behov.

#### Livskvalitet for pasienten

- Enda mindre støy<sup>2</sup>
- Ny belteklemme for bedre bærbarhet<sup>3</sup>

## Varsler og feil

### For status og feilsøking

| Visningsstatus | Indikatorstatus                                                                       | Mulig årsak                                                                                                                                                        | Kommentarer/feilsøking                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Alle indikatorer av                                                                   | Pumpen er i standby.                                                                                                                                               | NPWT er satt på pause. Trykk på den oransje knappen for å gjenoppta NPWT.                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                       | Pumpen har fullført sårbehandlingen med negativt trykk (NPWT).                                                                                                     | Å trykke på den oransje knappen vil ikke gjenoppta NPWT. Helsepersonell må påføre ny pumpe og skifte bandasje hvis ytterligere NPWT er nødvendig.                                                                                                                               |
|                |                                                                                       | Batteriene er tomme.                                                                                                                                               | Dersom pumpen ikke har fullført NPWT-behandlingen, bytter du batteriene.                                                                                                                                                                                                        |
|                | Grønn «OK»-indikator blinker                                                          | Systemet fungerer riktig. Ingen problemer.                                                                                                                         | Noen ganger kan det være mulig å høre at pumpen arbeider med å opprettholde det negative trykket. Dette er normalt.                                                                                                                                                             |
|                | Grønn «OK»-indikator og oransje lekkasjeindikator blinker                             | Pumpen arbeider for å oppnå NPWT, men har foreløpig ikke nådd riktig trykk.                                                                                        | Vent i opptil 65 sekunder. Undersøk om NPWT er opprettet.                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Grønn «OK»-indikator og oransje indikator for lavt batterinivå blinker                | Systemet fungerer riktig, men batterinivået er lavt.                                                                                                               | Bytt batterier, og trykk på den oransje knappen for å gjenoppta behandlingen.                                                                                                                                                                                                   |
|                | Oransje lekkasjeindikator blinker                                                     | En større luftlekkasje er oppdaget. NPWT er ikke i bruk. (Merk: Pumpen vil automatisk prøve å gjenoppta NPWT etter en time).                                       | Glatt ut bandasjene og stripsene for å fjerne alle skrukker. Trykk på den oransje knappen for å gjenoppta NPWT. Hvis luftlekkasjen vedvarer, begynner den oransje lekkasjeindikatoren å blinke etter ca. 60 sekunder. Kontroller at slangekoblingene er vridd ordentlig sammen. |
|                | Oransje lekkasjeindikator og oransje indikator for lavt batterinivå blinker           | En større luftlekkasje er oppdaget, og batterinivået er lavt. NPWT er ikke i bruk. (Merk: Pumpen vil automatisk prøve å gjenoppta NPWT etter én time).             | Fjern luftlekkasjen ved å følge instruksjonene ovenfor. Bytt også batterier, og trykk på den oransje knappen for å gjenoppta behandlingen.                                                                                                                                      |
|                | Oransje indikator for full bandasje blinker                                           | Bandasjen er mettet, eller filteret er blokkert. NPWT er ikke i bruk. (Merk: Pumpen vil automatisk prøve å gjenoppta NPWT etter en time)                           | Helsepersonell må skifte bandasjen og trykke på den oransje knappen for å gjenoppta NPWT.                                                                                                                                                                                       |
|                | Oransje indikator for full bandasje og oransje indikator for lavt batterinivå blinker | Bandasjen er mettet eller filteret er blokkert, og batterinivået er lavt. NPWT er ikke i bruk. (Merk: Pumpen vil automatisk prøve å gjenoppta NPWT etter en time). | Helsepersonell må skifte bandasjen. Bytt også batterier, og trykk på den oransje knappen for å gjenoppta behandlingen.                                                                                                                                                          |
|                | Alle indikatorer lyser kontinuerlig                                                   | En pumpefeil er oppdaget. Pumpen kan ikke lenger levere NPWT.                                                                                                      | Helsepersonell må påføre en ny pumpe og bandasje.                                                                                                                                                                                                                               |


## Påføringsveiledning



1. Rengjør og klargjør såret i henhold til lokal prosedyre.


### Bandasjer

2. Riv av den midtre fliken av beskyttelseslaget, og plasser bandasjen midt over såret. Porten skal være øverst i forhold til såret.
3. Fjern de andre to fliken av beskyttelseslaget. Glatt ut bandasjen rundt såret for å unngå skrukker.

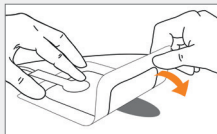



### Trykk

4. Sett inn batteriene i enheten.
5. Fest enheten til bandasjen ved å vri slangekoblingene sammen.
6. Trykk på den oransje knappen for å starte påføringen av negativt trykk. Den grønne lampen begynner å blinke (dette viser at systemet fungerer).

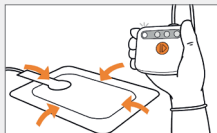


### Bruk


7. Fest festetapen til hver av de fire sidene av bandasjen.
8. Enheten har syv dagers varighet, og bandasjen kan forbli på plass i inntil 7syvdager avhengig av eksudatmengden.
9. Ved bruk av fyllstoff må fyllstoffet og PICO-bandasjen skiftes to til tre ganger pr. uke.

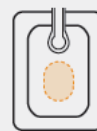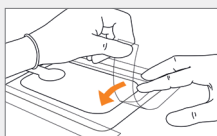

**A** Bandasjen er riktig plassert og kan forbli der den er

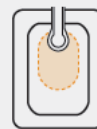

**B** Bandasjen må skiftes – porten kan være blokkert av væske

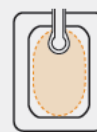

**C** Bandasjen må skiftes – det absorberende området er fullt

## Bestillingsinformasjon

| Bandasje | Bandasjestørrelse             | 2 stk. bandasjesett* | 1 stk. bandasjesett** | Flerpakninger*** |
|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|          | 10 cm x 20 cm                 | 66802002             | 66802012              | 66802022         |
|          | 10 cm x 30 cm                 | 66802003             | 66802013              | 66802023         |
|          | 10 cm x 40 cm                 | 66802004             | 66802014              | 66802024         |
|          | 15 cm x 15 cm                 | 66802005             | 66802015              | 66802025         |
|          | 15 cm x 20 cm                 | 66802006             | 66802016              | 66802026         |
|          | 15 cm x 30 cm                 | 66802007             | 66802017              | 66802027         |
|          | 20 cm x 20 cm                 | 66802008             | 66802018              | 66802028         |
|          | 25 cm x 25 cm                 | 66802009             | 66802019              | 66802029         |
|          | Multisite liten 15 cm x 20 cm | 66802000             | 66802010              | 66802020         |
|          | Multisite stor 20 cm x 25 cm  | 66802001             | 66802011              | 66802021         |

### Forbruksartikler

### Varenr.

|  |                         |                 |          |
|--|-------------------------|-----------------|----------|
|  | Bandasjefyll av skum    | 10 cm x 12,5 cm | 66801021 |
|  | Bandasjefyll av gasbind | 11 cm x 4 m     | 66802127 |

\* 2 stk. bandasjesett = 2 bandasjer + 1 pumpe; \*\* 1 stk. bandasjesett = 1 bandasje + 1 pumpe; \*\*\* Flerpakninger = 5 bandasjer (uten pumpe)

Wound Management  
Smith & Nephew AS  
Nye Vaksås vei 64  
1395 Hvalstad

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

©Varemerket tilhører Smith & Nephew  
™Alle varemerker er godkjent  
© Smith & Nephew oktober 2017  
18-02946-NO

T +47 66 84 20 20  
F +47 66 84 20 90

Supporting healthcare professionals for over 150 years

Detaljert produktinformasjon, inkludert indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, effekter, advarsler og viktig sikkerhetsinformasjon finner du ved å alltid lese bruksanvisningen for produktet før bruk.

### Referanser

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO® vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in operation. September 2016; 3. WMP.11446.UF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.