

Hydrogel for effektiv, fuktig sårbehandling



INTRASITE[®] rehydrering av tørre sår - skånsom fjerning av tørre nekroser

INTRASITE Gel og INTRASITE Conformable rehydrerer tørre sår og påskynder en rask og skånsom fjerning av tørre nekroser samtidig som gelen absorberer dødt vev og sårveske. INTRASITE kan også benyttes til å gi et fuktig sårmiljø i granulerings- og epiteliseringsfasen av sårtilheling. INTRASITE Conformable kan også benyttes til å pakke dypere sår slik at disse gror fra bunnen av samtidig som den gir et effektivt fuktig miljø i såret. INTRASITE Gel er en klar gel bestående av en modifisert carboxymethylen cellulose-polymer, propylenglykol og vann. I INTRASITE Conformable er denne gelen lagt i en non-woven duk. INTRASITE gir et bakteriostatisk sårmiljø.

FORDELER

Løser nekroser

Alt dødt vev i såret må fjernes for at sårtilhelingsprosessen skal gå som normalt. INTRASITE fremmer den naturlige autolytiske prosessen gjennom rehydrering av vevet og gir en rask og skånsom sårtilheling.

Opprensing

I inflammasjonsfasen av sårtilheling dannes pusslignende substans gjennom akkumulering av døde celler i såreksudatet. Ved å trekke overskytende eksudat fra såroverflaten stopper INTRASITE denne prosessen. Der "puss" allerede er dannet vil den skånsomme rehydreringseffekten effektivt fjerne dette uten å skade friskt vev.

Fremmer fuktig sårbehandling

INTRASITE gir et korrekt fuktig miljø i såret og hindrer skorpedannelser. Gjennom å holde det skjøre granulasjonsvevet fuktig hjelper INTRASITE utbredelsen av epitelceller over sårflaten og gir en rask, problemfri sårtilheling.

Bakteriostatisk

INTRASITE er en bakteriostatisk hydrogel som hindrer bakterier i å formere seg i såret. Det gir såret en hjelp mot utvikling av lokale sårinfeksjoner.

INDIKASJONER


INTRASITE benyttes til fjerning av dødt vev fra grunne, underminerte og dype sår (som f.eks trykksår, leggsår, diabetiske fotsår, ondartede sår, brannsår, operasjonssår, sår etter skolding, rift og skrubbsår, amputasjoner og funfusinfiserte sår). I tillegg også til behandling av granulerende kavitetssår, brutt hud og brannsår etter strålebehandling. INTRASITE kan benyttes på infiserte sår under medisinsk veiledning. Velg mellom INTRASITE Gel og INTRASITE Conformable etter sårets størrelse, dybde utseende og plassering.

BRUK

INTRASITE kan kombineres med for eksempel ALLEVYN skumbandasjer, OPSITE filmbandasjer og ACTICOAT sølvbandasjer.

FORSIKTIGHETSREGLER

INTRASITE må fjernes fra såret før strålebehandling, og heller ikke benyttes ved kjent overfølsomhet for gelen eller noen av (bestanddelene i den). INTRASITE Gel må brukes med forsiktighet i nærheten av øyne og i dype sår med trange åpninger (som fistler eller naturlige hulerom) hvor fjerning av gel kan være vanskelig. Ved slik applisering kan INTRASITE Conformable være et bedre alternativ. INTRASITE er kun til utvortes bruk.

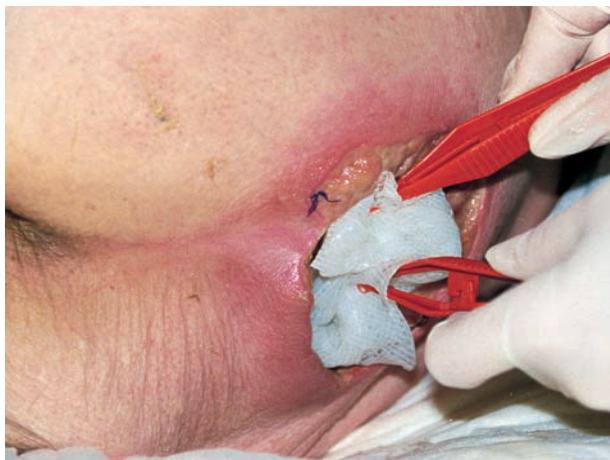

Wound Management

Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64
1395 Hvalstad

Norway
T 66 84 20 20
F 66 84 20 90

[™]Trademark of Smith & Nephew

www.smith-nephew.com/no

INTRASITE Gel

Art. nr.	Størrelse	Eske
7308	8g	10 stk
7311	15g	10 stk
7313	25g	10 stk
INTRASITE Conformable		
66000324	10x10cm	10 stk
66000325	10x20cm	10 stk
66000326	10x40cm	10 stk