

## Activon Manukahonung



**Sårbehandling...**  
**den naturliga vägen**

# Activon Tulle®

## Kompress med Manukahonung

### Produktbeskrivning

Activon Tulle är en viskos kompress mättad med 100% Manukahonung. Activon Tulle skapar en fuktig sårhelingsmiljö, tar bort odör samt har en antiseptisk effekt. Lämpligt för ytliga eller granulerande sår samt för debridering eller upprepning av nekrotiskt eller oren vävnad.

### Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt förband ex. Eclipse beroende på exudatmängd. Förvaras i rumstemperatur. Vid kraftigt infekterade sår kan Activon Tulle kombineras med extra Manukahonung med Activon tube

### Användningsområde

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

### Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö
- Fastnar inte i såret



### Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR 3761	Activon Tulle	5x5cm	5st
CR 3658	Activon Tulle	10x10cm	5st
CR 3830	Activon Tube	25 gram	12st

STERILE R



0120

#### SYLAK AB

Ekonomivägen 5  
436 66 Askim  
Tel: 031-748 49 50, Fax: 031-68 39 51  
www.sylak.se