

# Advazorb Silflo®

Absorberande skumförband med kontaktlager och fästkant av mjuk silikon

## Produktbeskrivning

Absorberande skumförband med Silfix mjuka silikonkontaktlager och fästkant. Förbandet har en absorptionsdyna bestående av ett mjukt skumförband med hög vätskehanteringsförmåga. Hålen i silikonlagret är stora för att optimera vätskehanteringen. Silikonkontaktlagret gör att förbandet fäster skonsamt på huden men inte på sårytan. Förbandet är designat för att minimera smärta och trauma i samband med förbandsbytena. Spärrskiktet andas, förhindrar läckage samt skyddar såret



## Bruksanvisning

Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen och placera förbandet över såret. Se till att dynan täcker sårytan. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka, beroende på exsudatmängd.

## Användningsområde

Alla typer av vätskande sår, t ex:

- Trycksår, bensår
- Traumatiska sår
- Postoperativt

## Fördelar

- Högt MVTR
- Bakteriebarriär
- Atraumatisk fästyta av silikon som minskar smärta vid förbandsbyte
- Mjuk och behaglig
- Fäster på torr hud men inte på sårytor
- Duschbar

| Produkt         | Varunr. | Storlek        | Antal förp. |
|-----------------|---------|----------------|-------------|
| Advazorb Silflo | 9314190 | 7,5 x 7,5 cm   | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314191 | 10 x 10 cm     | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314192 | 12,5 x 12,5 cm | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314193 | 15 x 15 cm     | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314194 | 10 x 20 cm     | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314195 | 20 x 20 cm     | 10          |
| Advazorb Silflo | 9314196 | 10 x 30 cm     | 10          |

