

Monteringsanvisning

Säker hantering av avfallsbehållare *euroMATIC®*, *steri*, *eco*, *opti*, *twin*

Placera locket på den lägre delen av behållaren. Det röda daglockets öppning och bärhandtaget ska peka åt samma håll.

Pressa ner motsatta hörn samtidigt för att låsa fast locket i behållaren.

Se till att locket sitter fast genom att trycka längs med sidorna, "klick-ljud" hörs vid korrekt montering. Se illustration över hur ett korrekt monterat lock ser ut.



Tillfällig förslutning av daglock / Permanent förslutning


1 x Ett tryck
(Vid fortsatt användning)



2 x Två tryck
(Permanent förslutning)



Tillfällig förslutning av daglock

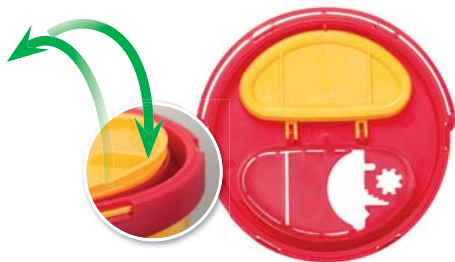

Permanent förslutning

