

Bruksanvisning Internkontroller Urinstickor MAS[®] UA Control

Kontrollerna är flytande (klara att använda) och utgörs av två olika droppflaskor,

- ✓ **Level 1 – Negativ/Normal nivå**
- ✓ **Level 2 – Positiv/Abnormal nivå**

I kontrollens bi-packsedel finns instrumentspecifika referensvärden angivna i arbiträra enheter (ex. neg, 1+,2+) och SI-enheter (ex. mmol/L, Leu/uL)



Hållbarheten för oöppnad kontrollflaska står på flaskans utsida (Exp. date),
Hållbarheten för öppnad kontrollflaska är:

- ✓ 3 månader vid förvaring i kyl (2-8° C)
- ✓ 6 veckor vid förvaring i rumstemperatur.

Instruktion

1. **Ta fram** kontrollflaskorna (vid förvaring i kylskåp, låt kontrollflaskorna stå i rumstemp. i 15 min)
2. **Blanda/vänd** flaskorna i minst 3 minuter (gärna på vagg)
3. Skruva av locket på flaskan märkt **Level 1**
4. **Tryck ut en droppe** på varje reagensfält (sug inte tillbaka något i flaskan),
5. Absorbera bort ev. överskott.
6. **Läs av** resultatet på samma sätt som ett patienturinprov – **och jämför** med referensvärden angivna för aktuellt instrument i bi-packsedeln.
7. **Upprepa** på samma sätt med flaskan märkt **Level 2**
8. Torka av flaskhalsen och sätt på skruvlocket – och sätt ev. tillbaka flaskorna i kylan.
9. Kontrollerna kan användas för graviditets tester, mikroalbumin eller kreatinin – och analyseras då på samma sätt som ovan.

Mina resultat stämmer inte – vad kan det bero på?

- ✓ Är kontrollflaskorna blandade ordentligt, och har de uppnått rumstemperatur?
 - ✓ Har kontrollerna använts längre än de är hållbara, eller är de förorenade?
 - ✓ Finns korrekt mängd kontrollösning på testfälten?
 - ✓ Resultaten på Level 2 kan variera något under tid, och kan skilja med "ett plus(+)" mer eller mindre från dag till dag
-