



Produkt- och användarinformation
till vårdpersonal

CORFLO® PEG

- Corflo Peg är tillverkad i polyuretan och levereras som ett set för anläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi.

Set innehållande: Corflo PEG slang, två olika externa fixeringar, klämma, ENFit Y-adapter, tork, drapering, skalpell, glidmedel, troakar och punkteringsnål.

- Corflo PEG har en luftfylld inre stopplatta och kan avlägsnas utan endoskopisk hjälp.
- Röntgentät tråd och centimetergradering på katetern för att underlätta verifikation av läget.
- Utbytbar ENFit adapter för anslutning till aggregat eller matningsspruta.
- Finns i storlekarna 12, 16 och 20 Fr.
- Möjlighet att anlägga och ansluta Corflo jejunalkateter via Corflo Peg.

Daglig rutin

- Rengör huden runt gastrostomikanalen dagligen med vatten och mild tvål.
- Kontrollera noga före rengöring om det förekommer läckage, irritation, rodnad eller svullnad. Kontrollera även att det inte smärtar vid rörelse av PEG-kateterslangen samt att den inte kan röras för mycket ut och in i gastrostomikanalen (inte mer än ca 6 mm).
- Lyft på PEG-kateterslangen och eventuell fixering för att komma åt att göra rent ordentligt.
- Om PEG-kateterslangen skulle åka ur gastrostomikanalen är det viktigt att den ersätts så fort som möjligt med t.ex. en gastrostomikateter, om det inte finns att tillgå klipp bort den inre stopplattan på Corflo PEG och stoppa in slangen under en kort tid.

- Det sitter en klämma på PEG-kateterslangen för att undgå läckage då Y-stycket är öppet. Flytta regelbundet klämman för att undvika slitage och skada på kateterslangen.

1 gång/vecka rutin

- Yttre fixeringsstycket kan tas av för rengöring. När fixeringsstycket är åter på PEG-kateterslangen efter rengöring ska det inte vara möjligt att röra kateterslangen mer än ca 6 mm.

Matning

- Sitt upp eller höj huvudändan vid matning.
- Aspirera från PEG-katetern för att bekräfta att den är korrekt placerad och ge mat, mediciner och vätska.
- Det är viktigt att skölja genom PEG-katetern med vatten före och efter mat och mediciner.
- Rutinmässig genomsköljning med vatten förhindrar uppkomst av stopp i PEG-katetern.

Övrigt

- Det går bra att bada och simma.
- Använd inga bandage om det inte är kliniskt nödvändigt.
- Det går utmärkt att äta via munnen om det är kliniskt möjligt.
- Det går bra att ge kropps-/lufttempererad vätska så som kaffe, saft mm via PEG-katetern.
- Munhygien är viktigt! Borsta tänderna två gånger dagligen och använd fukt på läppar och i munhåla.

För mer information se gärna vår hemsida www.gastrostomi.se eller kontakta oss på: md@viatris.com eller telefon: 08-630 19 00.

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se

Produkt- och användarinformation
till vårdpersonal

CORFLO® PEG


KUFFENS MEKANISM

CORFLO® PEG är tillverkad i polyuretan och kuffen bibehåller sin expanderade form tack vare ett sammandragande/expanderande polyuretan-skum. En luftkanal går från kuffen till atmosfären utanför genom ett litet hål nära PEG:ens ände. Vid insättande kollapsar kuffen för att anpassa till esofagus.


Kuffen återfår sin expanderande form då man stänger in luften i kuffen genom att sätta i CORFLO® Y-adapter (se nedan).



FIXERING OCH BYTE AV Y-ADAPTER

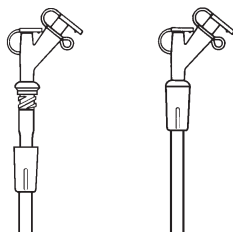

Trä på den gängade låsningsdelen. Tryck i adaptern. Skruva på låsningsdelen tills det tar stopp.

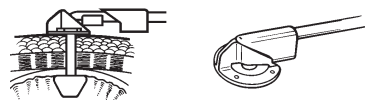


Säkra PEG-kateterslangen i fixeringsanordningens skåra och skjut sedan locket på plattan. Avsluta med att kontrollera och säkerställa rätt läge med aspiration och pH-sticka, vid osäkerhet kontakta läkare.

PEG UTDRAGNING (utförs av utbildad personal)

Smörj PEG:en och huden runt gastrostomikanalen med bedövningssalva. Snurra PEG:en och för den försiktigt ut och in i gastrostomikanalen för att smörja kanalen. Låt bedövningssalvan verka.

Öppna klämman och fixeringsstycket. Klipp av PEG-kateterslangen under Y-stycket.

Stabilisera runt gastrostomikanalen med fingrarna och ta ett stabilt grepp om PEG-katetern och dra ut PEG:en med ett bestämt drag.

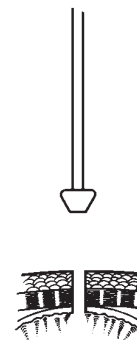

Produkt	Art.nr	Förpackning	Produkt	Art.nr	Förpackning	Produkt	Art.nr	Förpackning
Corflo PEG-kit 12 Fr	50-6512	2 st	Corflo PEG Jejunal 6 Fr För Corflo PEG 16 Fr	51-7366	5 st	Corflo PEG Jejunal 8 Fr Over-the-wire för Corflo PEG 20 Fr	51-7366	2 st
Corflo PEG-kit 16 Fr	50-6516	2 st	Corflo PEG Jejunal 8 Fr För Corflo PEG 20 Fr	51-7368	5 st	Corflo PEG Jejunal 10 Fr Over-the-wire för Corflo PEG 20 Fr	51-1431	2 st
Corflo PEG-kit 20 Fr	50-6520	2 st	Corflo PEG Jejunal 10 Fr För Corflo PEG 20 Fr	50-7361	5 st			
Corflo PEG Y-adapter 12 Fr	50-6112	5 st						
Corflo PEG Y-adapter 16 Fr	50-6116	5 st						
Corflo PEG Y-adapter 20 Fr	50-6120	5 st						

För mer information se gärna vår hemsida www.gastrostomi.se eller kontakta oss på: md@viatris.com eller telefon: 08-630 19 00.

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se

