

SILVERIN® STICKS

Silvernitrattsticka

Medicin-teknisk produkt

LÄS NOGA IGENOM DENNA BIPACKSEDEL INNAN DU ANVÄNDER DEN.

Använd alltid denna medicin-tekniska produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Vänd dig till din läkare om du behöver mer information, råd eller vid biverkningar. Om ingen förbättring sker eller om försämring uppstår kontakta din läkare.

INNEHÅLL I DENNA BRUKSANVISNING:

1. Vad är SILVERIN® Silvernitrattsticka och vad används de för?
2. Vad du behöver veta innan du använder SILVERIN® Silvernitrattsticka?
3. Hur använder du SILVERIN® Silvernitrattsticka?
4. Vilka biverkningar kan förekomma?
5. Hur förvaras SILVERIN® Silvernitrattsticka?
6. Förpackningens innehåll och ytterligare upplysningar

1. VAD ÄR SILVERIN® SILVERNITRATTSTICKA OCH VAD ANVÄNDS DE FÖR?

Silvernitratt har i låg koncentration en bakteriedödande effekt och är i hög koncentration frätande och sårbildande. Kaliumnitrattets uppgift är att minska silvernitrattets koncentration så att lösningen blir mildare. Denna blandning är placerad på en pinne, som på ett tändstickshuvud, och är klar för engångsbruk man har fuktat huvudet med vatten. Detta möjliggör en exakt behandling av det område man vill behandla.

ANVÄNDNINGSMÅNDRÄN:

Till vårtor, apthous stomatitits och som blodstillare av yttlig blödning samt vid näsblödning. Den kan också användas för att avlägsna överskott av vävnadstillväxt (svallkött) som kan uppstå vid läkning av hudsår. Navelsträngsrester kan avlägsnas med SILVERIN® Silvernitrattsticka, något som utförs av läkare eller barnmorska.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SILVERIN® SILVERNITRATTSTICKA?

Silvernitrattstickan får inte användas om du är allergisk mot silvernitratt eller kaliumnitratt. Det kan ta upp till 24 timmar innan det behandlande området blir svart.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:

- Vid hudförändringar som är ovanliga i färg eller form och som inte kan identifieras som granulatsvämnd eller som vanliga vårtor bör SILVERIN® STICKS endast användas under kontroll av läkare.
- Rör inte på SILVERIN® STICKS topp (etsmedel) med våta händer.
- Skydda dina kläder och andra föremål när du hanterar silvernitrattstickan.
- Silvernitratt leder till brunsvarta fläckar och dessa kan inte avlägsnas med vanliga rengöringsmedel.
- Om frisk hud oavsiktligt kommit i kontakt med silvernitrattstickan: Håll under rinnande vatten och rengör med en tvättvamp. Det kan fortfarande leda till att dessa hudområden blir mörka men detta är ofarligt. De mörka områdena bleknar efter ca 10-14 dagar.
- Om silvernitrattstickan kommit i kontakt med ögat: Håll genast det öppna ögat under rinnande vatten i minst 5 minuter, kontakta därefter läkare.
- Vid användning runt munnen och i munhålan är det mycket viktigt att se till att inga delar av toppen sväljs.

BARN: Användning på barn under 3 år bör endast ske efter kontakt med läkare. SILVERIN® STICKS 50% Silvernitrattsticka Medicin-teknisk produkt

ANDRA LÄKEMEDEL I KOMBINATION MED SILVERIN® SILVERNITRATTSTICKA:

Det finns inga kända interaktioner mellan andra läkemedel och SILVERIN® Silvernitrattsticka.

GRAVIDITET OCH AMNING:

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att få barn, rådgör med läkare innan du använder denna medicin-tekniska produkt.

BILKÖRNING:

Användning av SILVERIN® Silvernitrattsticka påverkar inte körförmågan.

3. HUR ANVÄNDER DU SILVERIN® SILVERNITRATTSTICKA?

Använd alltid denna medicin-teknisk produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel. Om du är osäker, fråga din läkare.

REKOMMENDERAD DOSERING:

Behandla endast små hudområden i taget.

TYP AV ANVÄNDNING:

För utvärtes bruk. Förbered huden du vill behandla så den är ren. Fukta silvernitrattstickans topp genom att fukta den med vatten. Toppen får då en vit eller något ljusgrå färgton och är nu klar för användning. Badda eller stryk stickan på området som ska behandlas noggrant och jämnt. Det behandlade området blir snabbt svart och stöts sedan bort efter ett par dagar. Upprepa behandlingen varannan eller var tredje dag tills önskat resultat uppstår. Stickorna är endast avsedda för engångsbruk.

OM MAN ANVÄNDER PREPARATET FÖR OFTA:

Om man använder preparatet för ofta (utan att invänta förbättring) så kan stickorna orsaka irritation eller inflammatoriska reaktioner i området runt om det behandlade området. I sådana fall kontakta läkare för konsultation.

4. VILKA BIVERKNINGAR KAN FÖREKOMMA?

Det kan förekomma överkänslighetsreaktioner eller lokal hudirritation, såsom klåda, rodnad, blåsor eller en mild brännande känsla. Om du märker några biverkningar, kontakta din läkare. Detta gäller även biverkningar som inte anges i bipacksedeln.

5. HUR FÖRVARAS SILVERIN® SILVERNITRATTSTICKA?

Förvara i originalförpackningen för att skyddas mot ljus. Förvara förpackningen torr. När förpackningen öppnats täta tills nästa användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Du får inte använda denna medicin-tekniska produkt efter utgångsdatum. Utgångsdatumet finns på förpackningens baksida. Kasta inte denna produkt i hushållsavfall. Fråga ditt apotek hur man kasserar produkten när du slutar använda den. Du bidrar således till att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR:

Paketet består av 10 eller 100 st silvernitrattstickor av trä (stel) eller plast (flexibel) med rund aktiv substansstopp med 50% silvernitratt och 50% kaliumnitratt (SILVERIN® STICKS 50%) eller 75% silvernitratt och 25% kaliumnitratt (SILVERIN® STICKS 75%).

FÖRPACKNINGENSTORLEK:

Finns i olika förpackningsstorlekar och med olika koncentration. Mer information finns på vår hemsida www.bano-healthcare.at
10 och 100 st 115 mm långa och
10 och 100 st 200 mm långa
SILVERIN® Silvernitrattsticka finns i varianterna flexibel och stel.

TILLVERKARE:

BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österrike, www.roesch-handel.at
Rösch & Handel är ett varumärke av BANO Healthcare GmbH.

DENNA BIPACKSEDEL ÄNDRADES SENAST:

September 2019