


**3M****Cavilon™**

Skin Care Solutions




# 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

## Applicering runt en stomi eller en fistel.\*

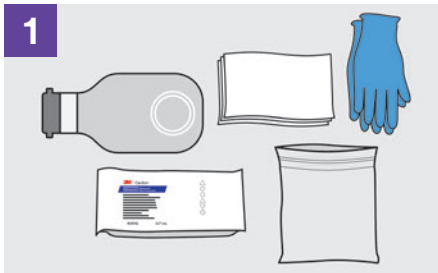


**Lägg materialet** på en ren yta och se till att du har smidig åtkomst till patienten. Förbered stomiartiklarna efter behov.


- ▶ Luddfria, mjuka dukar/ pappershanddukar fuktade med varmt vatten, samt extra dukar efter behov för att avleda avföring/urin
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel 0,7 ml applikator
- ▶ Undersökningshandskar
- ▶ Stomipåse eller andra stomitillbehör (t.ex. stomipasta, barriärremsor) efter behov
- ▶ Plastpåse eller behållare för avfall

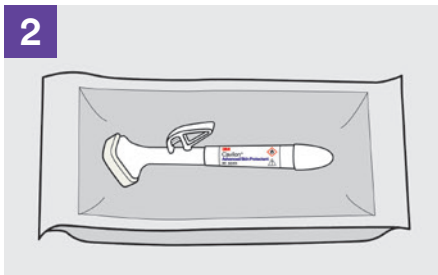

**Öppna förpackningen** till Cavilon Advanced hudskyddsmedel och lämna applikatorn i plastpåsen.

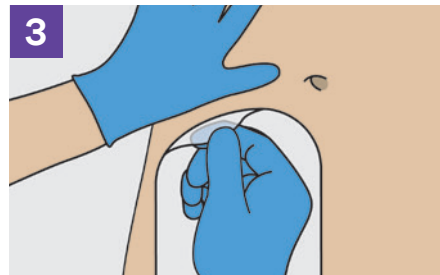


**Positionera patienten** och ta bort stomipåsen/flänsen.

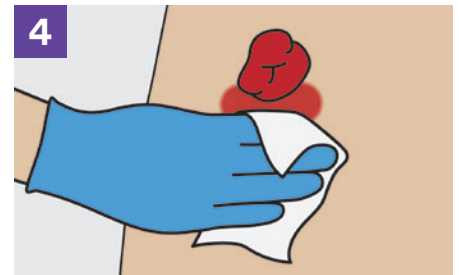


**Rengör försiktigt huden** för att ta bort avföring/urin eller kvarvarande stomipasta eller barriärmaterial. Torka försiktigt vid behov.

- ▶ Vid förlust av yttlig hud behöver du inte applicera stomipuder innan du applicerar Cavilon Advanced hudskyddsmedel
- ▶ Om du ska skydda hud kring en slang, ett dränage eller en enhet ska du rengöra huden för att avlägsna rester av salva/kräm/pasta

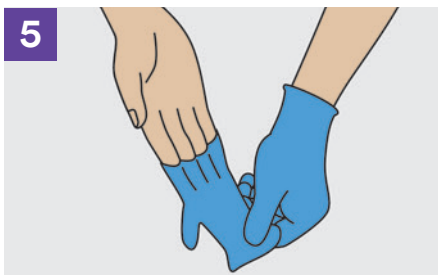

**Byt handskar.**

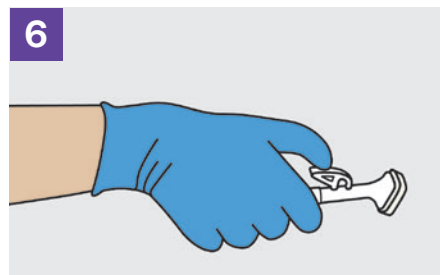

**Fatta tag om applikatorn** och placera tummen i änden av spaken.



**Rikta applikatorsvampen nedåt** och tryck kraftfullt ned spaken för att knäcka den inre ampullen.


\*Instruktionerna i den här guiden kan också följas för applicering av Cavilon Advanced hudskyddsmedel för hudskydd kring en slang, ett dränage eller annan enhet.

- ▶ Du hör ett klickande eller poppande ljud när ampullen knäcks



Håll applikatorn i en position som pekar nedåt i ungefär 10 sekunder för att släppa in vätska i skumsvampen.

- ▶ Vätskan flödar med hjälp av gravitationen så du behöver inte trycka på spaken
- ▶ Vätskan kommer inte att mätta svampen hela vägen till kanterna

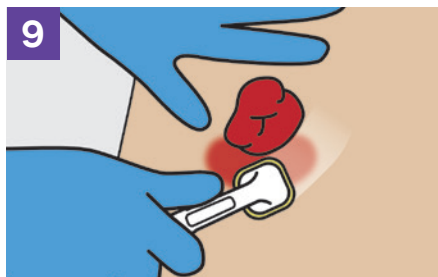


Tryck skumsvampen lätt mot huden och applicera på områden som är skadade och/eller kan exponeras för avföring/urin vid användning av påsen. Dra skumsvampen över det påverkade området för att skapa ett tunt, jämnt lager med minimal överlappning. För mindre områden kan du applicera produkten med försiktig duttning.

**Obs!** Tryck inte nedåt på spaken under applicering. Om du gör detta så kan det leda till att vätska ansamlas eller att det blir för kladdigt.


- ▶ Fortsätt applicera till dess att hela det aktuella området har täckts
- ▶ Dra inte fram och tillbaka över samma område under applicering

**Obs!** Ytterligare instruktioner om du använder en stor applikator (2,7 ml) i områden som är mindre än 65 kvcm:

- ▶ Efter att applikatorn har aktiverats ska du trycka ut en del av vätskan till baksidan av den övre vita delen av paketet
- ▶ Applicera produkten på patientens hud

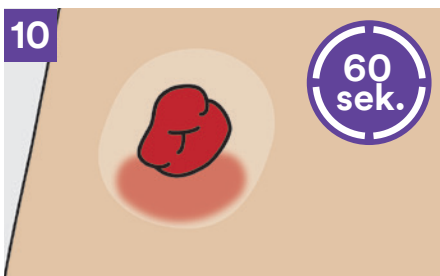

Låt produkten torka i minst 60 sekunder innan du applicerar stomipåsen eller fläns.

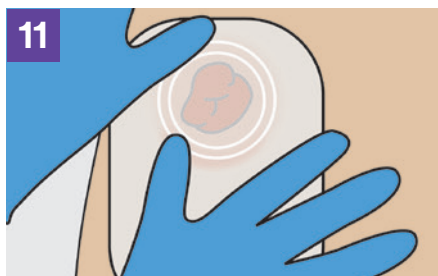

Applicera påsen eller flänsen enligt tillverkarens instruktioner.

**För hudskydd kring stomier eller fistlar,** applicera Cavilon hudskyddsmedel vid varje påsbyte.

- ▶ Om det aktuella området inte har en påse ska du applicera igen 2–3 ggr i veckan
- ▶ Vid efterföljande påsbyten, använd ett borttagningsmedel för häftämnen (innehållande hexametyldisiloxan (HDMS) eller ett siloxan) när du tar bort ett häftämne från huden som varit belagd med Cavilon Advanced hudskyddsmedel

**För hudskyddsmedel kring slangar, dränage eller enheter ska du applicera på nytt 2–3 ggr. per vecka.**

## Beställningsinformation

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Art. Nr.	Storlek	Antal/förpackn.
5050G4P	2.7 ml applikator	4
5050G	2.7 ml applikator	20
5051G4P	0.7 ml applikator	4
5051G	0.7 ml applikator	20

Om du har några frågor som rör applicering av 3M™ Cavilon™ hudskyddsmedel ska du kontakta din lokala 3M-representant eller besöka **3M.se**