

# *Användarguide*

ANVÄNDNING  
**STEG-FÖR-  
STEG**

**Bactiguard**<sup>®</sup>  
WOUND CARE

# *Patienters* LIVSKVALITET PÅVERKAS NEGATIVT AV SÅR

Oavsett om ett sår är akut eller svårläkt så handlar sårvård om att möjliggöra läkning och förebygga infektion. Bactiguard Wound Care-produkterna gör detta på ett vävnadskompatibelt sätt som främjar den naturliga läkningsprocessen. På det viset kan vi minska lidandet och underlätta vardagen för patienten.

---

## SÅRLÄKNING – EN UTMANING

Akuta och svårläkta sår kan vara utmanande, eftersom de har en tendens att bli infekterade, vilket försvårar den normala läkningsprocessen. Orsaken till det är att mikroorganismer har tagit sig in i såret.

Vårt primära mål är att förhindra dessa infektioner. Genom en effektiv sårrengöring kan vi preparera sårbädden och skapa rätt förutsättningar för en gynnsam läkning genom att säkerställa bildandet av frisk granulationsvävnad som gör att såret tillsluts.

Genom att på detta sätt förebygga infektioner, kan vi minska behovet av att använda antibiotika. Det är en vinst i sig för den enskilde individen, men också för samhället i stort eftersom det minskar risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Sårhäkning är en utmaning. Vår ambition är att stödja dig som arbetar med detta, särskilt när det handlar om akuta och svårläkta sår.

## **BACTIGUARD WOUND CARE – EN VÄVNADSVÄNLIG OCH NATURLIG SÅRBEHANDLING<sup>1</sup>:**

- > Verksamma ämnet Hypoklorsyra - en naturlig del av vårt eget immunförsvar
  - > Effektiv debridering av nektrotisk vävnad och sårskorpa
  - > Säker reducering av biofilm
  - > Verksam mot bakteriell tillväxt i såret
-

## FÖRBÄTTRAD SÅRLÄKNING MED BACTIGUARD WOUND CARE

Bactiguard Wound Care är en serie sårbehandlingsprodukter för effektiv sårtvätt, debridering och spolning som hanterar alla stadier av akuta, svårläkta och infekterade sår, samt

första och andra gradens brännskador. Bactiguard Wound Care minskar den mikrobiella belastningen, återfuktar såret och stödjer den naturliga läkningen.<sup>4</sup>



### VISSTE DU ATT?

- > **60%** av alla svårläkta sår är belagda med biofilm som är en källa för infektioner.<sup>2</sup>
- > **50%** av alla svårläkta sår uppskattas vara infekterade.<sup>3</sup>

### BACTIGUARD WOUND CARE SOLUTION

Det verksamma ämnet i Bactiguard Wound Care solution är hypoklorsyra vilket ingår naturligt i vårt immunförsvar.

Bactiguard Wound Care solution rengör på ett naturligt sätt, avlägsnar bakterier och biofilm vilket påskyndar sår läkningen. Bactiguard Wound Care är biokompatibel, svider inte och är skonsam mot vävnader.<sup>4</sup>

Bactiguard Wound Care solution finns i lösning och sprayform.

### BACTIGUARD WOUND CARE GEL

Bactiguard Wound Care gel återfuktar såret och har en lugnande och bakteriestatisk effekt över tid. Att bibehålla en fuktig sårbedd mjukar upp, förhindrar nekrotisk vävnad och påskyndar läkningen.<sup>4</sup>



# Sårets färg KAN GE RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER

Sårets färg kan vara en god vägledning under läkningsprocessen, i vilket stadium av den som patienten befinner sig i samt sårets allmänna status. Vanligtvis talar man om tre olika kategorier: röd, gul och svart. Beroende på sårets färg, kommer behandling och hantering att skilja sig åt. Bactiguard Wound Care erbjuder lösningar för varje stadium i läkningsprocessen.

## RÖD

BEHANDLA ENLIGT ANVÄNDARGUIDELINES MED BACTIGUARD WOUND CARE FÖR GRANULERADE SÅR

Ett sår med röd nyans indikerar att granulationsvävnad bildas och det är ett tecken på god status i läkningen. Denna typ av vävnad är rik på kollagen, ett viktigt element för hudtillväxt, och den får sin rödaktiga färg av de nybildade blodkärl som hjälper

till att främja tillväxten av ny vävnad över såret.

I detta skede av sårhäkningsprocessen är det viktigt att skydda vävnaden genom att fortsatt hålla en god fuktbalans.

## GUL

BEHANDLA ENLIGT ANVÄNDARGUIDELINES MED BACTIGUARD WOUND CARE FÖR INFEKTERADE SÅR

Ett sår med en blek, gröngul färg kan indikera bildande av slough-vävnad (en form av nekrotisk vävnad). Det tyder på en mycket allvarlig utveckling och att såret håller på att utveckla inflammation. I detta skede bör åtgärder för att förhindra infektion vidtas.

Eftersom hudtillväxten och läkningen har hämmats, öppnar slough-vävnad ytterligare möjligheter för bakterier och infektioner att leta sig in i såret och förvärra situationen. Om såret har den här färgen under en längre tid bör ytterligare medicinska åtgärder vidtas.

## SVART

BEHANDLA ENLIGT ANVÄNDARGUIDELINES MED BACTIGUARD WOUND CARE FÖR NEKROTISKA SÅR

Om ett sår når den punkt där det bildats svart eller mörk/läderartad brun vävnad är detta en indikation på nekros. Närvaro av nekrotisk vävnad (även kallad eschar-vävnad) hämmar kraftigt sårhäkningsprocessen eftersom det kväver sårets syre- och

blodflöde, vilket dödar den omgivande huden. I det här skedet är det viktigt att lösa upp den nekrotiska vävnaden och förhindra infektion. Eschar-vävnad måste behandlas omedelbart för att förhindra att den försämras och i värsta fall sprider sig.

# GENERELL ANVÄNDNING

---

## 1 SKÖLJ



Skölj och rengör såret med Bactiguard Wound Care (BWC) lösning. Ifall ingen biofilm eller behov av debridering föreligger, gå direkt till steg 4.

## 2 BLÖTLÄGG



Applicera kompresser indränkta med BWC lösning i såret. Låt verka i 10-15 minuter för att eliminera biofilm samt underlätta debridering.

## 3 RENGÖR



Mekanisk debridering. Rengör såret med kompresser indränkta i BWC lösning.

---

## 4 APPLICERA GEL



Applicera 2-5 mm BWC gel (från tub eller sprayflaska) i såret.

## 5 TÄCK SÅRET



Täck med lämpligt sekundärförband baserat på sårtyp.

Omläggning görs 1-2 gånger/vecka, men oftare kan behövas initialt.

## GRANULERANDE SÅR

---

### 1 SKÖLJ



Skölj och rengör såret med Bactiguard Wound Care (BWC) lösning.

### 2 APPLICERA GEL



Applicera 2-5 mm BWC gel (från tub eller sprayflaska) i såret.

Såret kan förbli öppet och utan förband beroende på sjukvårdspersonalens bedömning.

---

## INFEKTERADE SÅR

---

### 1 SKÖLJ



Skölj och rengör såret med Bactiguard Wound Care (BWC) lösning.

### 2 BLÖTLÄGG



Applicera kompresser indränkta med BWC lösning i såret. Låt verka i 10-15 minuter för att eliminera biofilm samt underlätta debridering.

### 3 RENGÖR



Mekanisk debridering. Rengör såret med kompresser indränkta i BWC lösning.

### 4 TÄCK SÅRET



Täck med lämpligt sekundärförband baserat på sårtyp.

Omläggning görs 1-2 gånger/vecka, men oftare kan behövas initialt.

# NEKROTISKA SÅR

---

## 1 SKÖLJ



Skölj och rengör såret med Bactiguard Wound Care (BWC) lösning.

## 2 APPLICERA GEL



Applicera 2-5 mm BWC gel (från tub eller sprayflaska) i såret.

## 3 RENGÖR



Mekanisk debridering. Rengör såret med kompresser indränkta i BWC lösning.

---

## 4 TÄCK SÅRET



Täck med lämpligt sekundärförband baserat på sårtyp.

Omläggning görs 1-2 gånger/vecka, men oftare kan behövas initialt.