

Förslutning av riskavfallsbehållare



San Sac riskavfallsbehållare är framtagna i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett säkert omhändertagande av riskavfall.

Om behållarens förslutning ska fungera som tänkt är det viktigt att du som försluter behållarna följer dessa instruktioner.

1

Placera behållaren på ett stabilt och plant underlag. Börja med att trycka ner locket i två motsatta hörn.



2

Gör samma sak med de två återstående hörnen.



3

Fortsätt trycka ner utmed långsidorna.



4

Avsluta med att trycka ner locket utmed kortsidorna. Kontrollera att låshakarna längs lockets sidor snäppt fast.



Instruktion för modeller med dubbellock



Det rektangulära locket försluts enligt ovan.

Det mindre locket kan positioneras i olika lägen enligt följande symboler på locket:



Öppna - vrid locket till symbolen, öppet hänglås.



Tillfällig förslutning - vrid locket till stopp mot symbolen halvstängt hänglås.



Permanent förslutning - öppna locket och placera mitt för symbolen stängt hänglås. Tryck hårt rakt ner.

