




INSTRUMENTVÅRD

ERINOX

SPECIALTVÄTTMEDEL

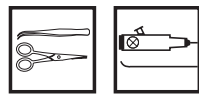

Användningsändamål

Erinox är ett lågskummande specialtvättmedel för rengöring av instrument och vårdutrustning.

Egenskaper

Erinox lämpar sig väl

- som tvättmedel i ultraljudstvätt
- för manuell rengöring av endoskop
- för manuell tvätt av vårdutrustning
- för tvätt av tandläkarinstrument
- för tvätt av ömtåliga glasvaror
- för tvätt av laboratorieutrustning

Specialtvättmedlet Erinox lösgör effektivt orenligheter och fettsmuts. Det lämpar sig även väl för rengöring av ömtåliga material.

Bruksanvisning

Tillred en brukslösning av specialtvättmedlet Erinox enligt anvisningarna. En färdig brukslösning skall bytas dagligen. Vid manuell rengöring skall brukslösningen tillredas separat för varje rengöringsåtgärd. Tvättade instrument sköljs och torkas. Ställ instrumenten gles i en ultraljudstvätt. Skölj instrumenten efter tvätten. Vid behov desinficera instrumenten före tvätt.

Observera

Använd skyddshandskar.

Erinox bruks- och utspädningsanvisningar	%	Erinox	Vatten	OBS!
Ultraljudstvättar				
- daglig tvätt	1-2 %	10-20 ml	1 l	byt den utspädda lösningen 1-2 x per dag blötläggning vid behov 2 %
- grundtvätt	2 %	20 ml	1 l	
Manuell tvätt				
- endoskop	2 %	20 ml	1 l	
- övrig utrustning	1-2 %	10-20 ml	1 l	

Varudeklaration

Nonjoniska tensider	5–15 %	tvätteffekt
Anjoniska tensider	< 5 %	tvätteffekt
Butylglykol	< 5 %	fettlösare, ökar tvätteffekten på svåråtkomliga ställen
Trietanolamin	< 5 %	korrosionsskydd
EDTA	< 5 %	komplexbildare

pH

Brukslösningens pH 9

Förvaring

I rumstemperatur 3 år

Tillverkningsland

Finland

Miljöpåverkan

Förpackningarna tillverkas av PEHD-plast som är ett miljövänligt, fullständigt återvinningsbart och brännbart material. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Förpackningsstorlek/ produktkod

3 x 5 l dunk	8114	EAN 641260 008114 5
6 x 1 l flaska	8113	EAN 641260 008113 8

Mer information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.se eller via kundtjänst på asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.