




Science.
Applied to Life.™



3M Hälsövärd

loban 2 antimikrobiell incisionsfilm

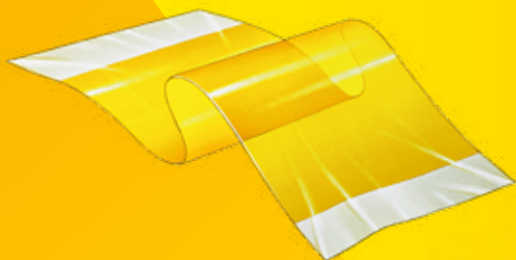

3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsduk

Den vanligaste källan till postoperativ sårinfektion är patienten själv. Den normala bakteriefloran på huden kan ge upphov till besvärliga infektioner om de kontaminerar operationssåret. Med en incisionsfilm upprättar man en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. Ioban 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, en organisk jodförening. Med Ioban 2 får du en steril arbetsyta direkt över sårytan genom att incisionsfilmen långsamt och kontrollerat frisätter fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt och den preoperativa hudinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under längre tid*. Filmen är semipermeabel, vilket betyder att den tillåter huden att andas men inte ger bakterier möjlighet att tränga igenom. Genom att huden tillåts andas genom incisionsfilmen säkerställs en förbättrad vidhäftning. Häftämnet på Ioban är detsamma som gjort Micropore™ känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning.

Applicering



Desinficera huden enligt gällande rutiner. Låt huden torka till dess att den är helt torr.



Två personer skall hjälpas åt att ta bort skyddspappret till dess att stoppmärket blir synligt.



Håll filmen över det tilltänkta incisionsstället utan sträckning (skall hänga i en båge).



Stryk på filmen, först längs det tilltänkta incisionssnittet med en steril handduk.



Stryk sedan försiktigt på den resterande delen, från incisionsstället.

Borttagande



Om hudförslutning sker intrakutant kan man låta incisionsfilmen sitta kvar tills det är dags att applicera förband.



Om hudförslutningen ej sker intrakutant; skapa ett veck i filmen genom att klämma filmen med pincett vid incisionskanten.



Vecket lossas från huden. Separera filmen från huden vid incisionskanten, upp till tre centimeter från huden. Fortsätt med förslutningen.



Lossa filmen från engångsdukar och lakan som är fästa vid den, genom att dra duken 180° bakåt, mot dig. Drag försiktigt med jämn kraft. Drag inte uppåt.

*Johnston et al. Rate of bacterial recolonization of the skin after preparation: four methods compared

Beställningsinformation

3M art nr	Incisionsyta	Antal/förp	Förp/lev förp
6635	10 × 20 cm	10	4
6640EU	34 × 35 cm	10	4
6648EU	56 × 60 cm	10	4
6650EU	56 × 45 cm	10	4
6651EU	56 × 85 cm	10	4
6661EZ	26 × 20 cm	50	2
6640EZE	35 × 35 cm	10	4
6648EZE	60 × 60 cm	10	4
6650EZE	60 × 45 cm	10	4
6651EZE	60 × 85 cm	10	4

Material: Polyesterfilm

Häftämne: Akrylatbaserat, povidonjod (jodoform)

Tillverkningsland:

USA: 6635, 6661EZ

Polen: 6640EU, 6648EU, 6650EU, 6651EU, 6640EZE, 6648EZE, 6650EZE, 6651EZE

Hållbarhet: 2 år

Steriliseringmetod: Gammastrålning

Förvaring: I normal rumstemperatur och luftfuktighet

Produkterna är CE-märkta och sterila



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/msd

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2019.
Alla rättigheter förbehålls. PL530117-12SE190904