

Bladlansett, spädbarn

för kapillärprovtagning



- Säker för användare och patient - kan ej återanvändas
- Steril
- Enkel att använda – säkrad avfyrningsanordning eliminerar risken för oavsiktlig aktivering
- Greppvänlig – tre möjliga grepp
- Bra precision – har en liten anläggningsyta
- Olika utförande – kan anpassa typ av lansett beroende på önskad blodvolym
- Färgkodad
- Mjukt silikoniserade blad samt trippelslipade nålar för att minska smärta
- CE- märkta

Bruksanvisning:



1. Vrid av skyddslocket genom att vrida $\frac{1}{4}$ varv
2. Tryck Safety Lancet fast mot den utvalda och rengjorda punktionsytan och tryck på avtrycksknappen (uppstår klick ljud)
3. Kasta genast den använda lansetten i därför avsedd behållare

Tre valfria grepp:



Aktivering med tummen



Aktivering med pekfinger



Benämning:	Art.nummer:	Inner / ytterfp:
Bladlansett, rosa, stickdjup 1,2 mm, blad 1,5 mm	85.1019	200/1200