

Produktfaktablad TENA ProSkin Pants Plus, Super och Maxi

Användningsområde

TENA Pants i Plus, Super och Maxi absorption är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora till mycket stora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Finns i sex storlekar från XXS till XL och tre absorptionsnivåer. Skyddet tas enkelt på och av som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.



Sidosömmar som går att riva

Tunn och följsam - alla material är andningsbara för största komfort för användaren

Förbättrad läckagebarriär

högre och mjukare med färgad elastik som visar absorptionsnivå

- Blå — Plus
- Grön — Super
- Lila — Maxi

Spridningskikt FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Färgad midjeelastik visar absorptionsnivå



Unik dubbel absorptionszon ConfioFit™

Dubbla kanaler som sprider vätska effektivt och möjliggör en tunnare produkt med bibehållen kapacitet.

Innovativ resår

under kärnan ger kroppsnära passform och smidighet i grenen. Produkten sjunker inte ner i vått tillstånd.

Diskret våtindikator

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



Produktfaktablad TENA ProSkin Pants Plus, Super och Maxi

Produktegenskaper

TENA Pants med ConfioFit™ har en unik patenterad kärnkonstruktion. Den innovativa resåren formar kärnan som sprider vätskan i dubbla kanaler och ger ett tunnare och mer bekvämt skydd som är lika säkert.

Förbättrad och bevisad komfort och diskretion^{1,2,3}

34%
mindre
kärnexpansion¹

TENA Pants med ConfioFit™ expanderar inte lika mycket under användning. Vätskan sprids i dubbla kanaler och bibehåller en kroppsnära passform

18%
mer kroppsnära
passform¹

TENA Pants med ConfioFit™ sitter närmare kroppen under användning

51%
förbättrad
designstabilitet¹

TENA Pants med ConfioFit™ — har en kärna som formar sig själv och har en mindre variation i kärnformen

1. 3D body scanning; Objective measurement based on ISO: 15621.
2. C&U study with consumers in FR and DE, Aug 2011 - In a study of 182 women with incontinence.
3. Product Preference study in NH, April 2011

Benelastik tillsammans med läckagebarriärer som sluter tätt mot huden gör skyddet både bekvämt och läckagesäkert. Mjuk och hög läckagebarriär med färgad elastik som visar absorptionsnivå. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr, vilket främjar en god hudhälsa.

TENA Pants är gjorda av mjuka, andningsbara material vilket ger ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Midjeresåren (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger tillsammans med ConfioFit™ en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Storlekarna L och XL har extra elastiktrådar fram till för ännu bättre passform och komfort.

TENA Pants är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.


Färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå. Tejprensan på baksidan av skyddet anger storlek och gör det enkelt att fästa ihop skyddet innan det slängs (gäller ej XXS och XS).

Produktfaktablad TENA ProSkin Pants Plus, Super och Maxi



TENA Pants										
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/höft cm	Vikt g	Ben- öppning cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal/kart	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Praktisk absorption	Essity Art.nr
Plus										
XX-Small	✓	40-70	68	30-54	14	56	20	1438	479	79 22 15
X-Small	✓	50-70	69	35-55	14	56	20	1389	463	79 23 40
Small	✓	65-85	69	40-65	14	56	20	1466	489	79 24 65
Medium	✓	80-110	72	45-70	14	56	20	1447	482	79 25 65
Large	✓	100-135	77	55-80	14	56	20	1438	479	79 26 65
X-Large	✓	120-160	82	65-90	12	48	20	1540	513	79 27 64
Super										
Small	✓	65-85	84	40-65	12	48	20	1906	635	79 34 63
Medium	✓	80-110	88	45-70	12	48	20	1905	635	79 35 63
Large	✓	100-135	93	55-80	12	48	20	1937	646	79 36 63
X-Large	✓	120-160	98	65-90	12	48	20	1877	626	79 37 63
Maxi										
Small	✓	65-85	101	40-65	10	40	20	2562	854	79 44 10
Medium	✓	80-110	109	45-70	10	40	20	2428	809	79 45 61
Large	✓	100-135	114	55-80	10	40	20	2524	841	79 46 61
X-Large	✓	120-160	124	65-90	10	40	20	2722	907	79 47 62

Användarinstruktion

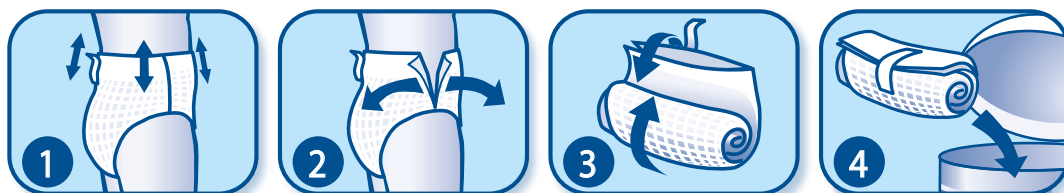

Produktfaktablad TENA ProSkin Pants Plus, Super och Maxi

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

HÖFT-, GREN- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kropps nära passform

BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige