

Tappningskateter för kvinnor

- Hydrofilt ytskikt
- Klar efter 30 sekunder
- Ytbehandlade kateterögon



Tappningskateter

Blåstömningssystem innebär svårighet att tömma sin urinblåsa fullständigt. Det kan bero på många olika orsaker. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) och på så sätt undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

EasiCath®

EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Varje kateter ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta. Önskas en styvare kateter, fylls kateterförpackningen med kallt vatten. För mjukare kateter fylls den istället med varmt vatten. Förpackningen är försedd med klisteretikett och hål, så att den kan hängas upp på väggen när den fyllts med vatten. För så skonsam kateterisering som möjligt, är ytskiktet pålagt efter det att kateterögonen stansats. Friktionen mellan katetern och uretrasleminnan blir på så sätt minimal.

EasiCath	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	30	20	053685
	● 10	30	20	053705
	○ 12	30	20	053725
	● 14	30	20	053745
	● 16	30	20	053765
Luerlock	● 08	30	20	052685
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	20	052705
	○ 12	30	20	052725
	● 14	30	20	052745

EasiCath® Set

Ett allt i ett tappningsset som består av en EasiCath kateter integrerad i en urinuppsamlingspåse tillsammans med en ampull koksalt (0.9%). Riv av fliken på påsen och töm innehållet genom öppningen. EasiCath Set är perfekt när man inte har tillgång till toalett, kranvatten eller inte vågar lita på vattenkvaliteten.



EasiCath® Luerlock

En hydrofil tappningskateter med nelatonspets som är avsedd att användas för intra-vesikulär instillation. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.



EasiCath Set	Ch (storlek)	Förp (styck)	Volym (ml)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	20	700	20	280010
	● 10	20	700	20	280020
	○ 12	20	700	20	280030
	● 14	20	700	20	280040

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söföbränning med energivinnning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-02.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 200 ex. SP2511

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se