

# Coloplast Irrigationssystem



## Större frihet och diskretion

Om du väljer att irrigera återfår du kontrollen över tarmtömningen och uppnår därför en större frihet och diskretion. Irrigationsmetoden medför färre hudproblem och färre luft- och luktbekymmer. Mellan irrigationstillfällena kan du använda mer diskreta bandage, som minipåsar, Coloplast® Minicap eller Assura® Conceal propp.

## Vem kan irrigera?

Irrigationsmetoden kan användas av kolostomiopererade som har en sigmoideostomi, och är i gott fysiskt och mentalt skick. Det är också viktigt att ha tillgång till ordentliga toalettförhållanden.

Rådfråga alltid din läkare eller stomiterapeut, eftersom det kan finnas andra orsaker som utesluter möjligheterna att irrigera.



## Vad sker vid irrigation?

Irrigation betyder sköljning av tarmen. Vatten hålls in i tarmen och utlöser tarmens tömningsreflexer så att tarmen tömmer sig. De flesta som irrigerar gör det varannan dag, medan några gör det med kortare eller längre intervall. Man bör avsätta ca. 1 timme för att irrigera.

Efter instruktion och träning tillsammans med stomiterapeuten kan du själv irrigera hemma. Irrigationssetet består av:

- en vattenbehållare med inbyggd termometer
- en stomikon
- en irrigationspåse
- en platta och ett bälte eller - om man använder Assura 2-dels - en basplatta.



## Sortiment

	Ringstorlek	Apoteksvnr	Artikelnr	Styck/frp	Längd
<b>Coloplast Irrigationssystem</b>					
Startset		229245	015010	1	
<b>Irrigationspåse med Assura koppling</b>					
Click 40 transparent	40-ring	243626	128340	30	950 mm
Click 50 transparent	50-ring	243634	128350	30	950 mm
Click 60 transparent	60-ring	243642	128360	30	950 mm
<b>Bygel</b>	60 mm	243659	128200	5	
Colotip stomikon (passar till startset)		273144	011100	*4	
* Från apoteket 1 t/fp					