

# Tappningskateter för kvinnor

- Hydrofilt ytskikt
- Klar efter 30 sekunder
- Ytbehandlade kateterögon



# Tappningskateter

Blåstömningproblem innebär svårighet att tömma sin urinblåsa fullständigt. Det kan bero på många olika orsaker. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) och på så sätt undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

## EasiCath®

EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Varje kateter ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta. Önskas en styvare kateter, fylls kateterförpackningen med kallt vatten. För mjukare kateter fylls den istället med varmt vatten. Förpackningen är försedd med klisteretikett och hål, så att den kan hängas upp på väggen när den fyllts med vatten. För så skonsam kateterisering som möjligt, är ytskiktet pålagt efter det att kateterögonen stansats. Friktionen mellan katetern och uretrasleminnan blir på så sätt minimal.

EasiCath	Ch (storlek)	Förp (styck)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	30	20	053685
	● 10	30	20	053705
	○ 12	30	20	053725
	● 14	30	20	053745
	● 16	30	20	053765
Luerlock	● 08	30	20	052685
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	20	052705
	○ 12	30	20	052725
	● 14	30	20	052745

## EasiCath® Set

Ett allt i ett tappningsset som består av en EasiCath kateter integrerad i en urinuppsamlingspåse tillsammans med en ampull koksalt (0.9%). Riv av fliken på påsen och töm innehållet genom öppningen. EasiCath Set är perfekt när man inte har tillgång till toalett, kranvatten eller inte vågar lita på vattenkvaliteten.



## EasiCath® Luerlock

En hydrofil tappningskateter med nelatonspets som är avsedd att användas för intra-vesikulär instillation. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.



EasiCath Set	Ch (storlek)	Förp (styck)	Volym (ml)	Längd (cm)	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 08	20	700	20	280010
	● 10	20	700	20	280020
	○ 12	20	700	20	280030
	● 14	20	700	20	280040

### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energutvinning.



Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-02.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 200 ex. SP2511

Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
Växel: 0300-332 50  
Kundservice: 0300-332 56  
se@coloplast.com  
www.coloplast.se

# Tappningskateter för män

- Hydrofilt ytskikt
- Klar efter 30 sekunder
- Ytbehandlade kateterögon



# Tappningskateter

Blåstömningssystem innebär svårighet att tömma sin urinblåsa fullständigt. Det kan bero på många olika orsaker. Med hjälp av en tappningskateter kan blåsan tömmas enligt RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) och på så sätt undviker man de problem som ofullständig blåstömning kan medföra.

## EasiCath®

EasiCath är en hydrofil tappningskateter. Varje kateter ligger i en steril förpackning som är lätt att öppna. Kateterförpackningen fylls med vanligt vatten och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta. Önskas en styvare kateter, fylls kateterförpackningen med kallt vatten. För mjukare kateter fylls den istället med varmt vatten. Förpackningen är försedd med klisteretikett och hål, så att den kan hängas upp på väggen när den fyllts med vatten. För så skonsam kateterisering som möjligt, är ytskiktet pålagt efter det att kateterögonen stansats. Friktionen mellan katetern och uretraslemhinnan blir på så sätt minimal.

EasiCath®	Ch (storlek)	Längd (cm)	Förp (styck)	Coloplast art nr
Nelaton för pojkar/ungdom	● 08	30	30	050885
	● 10	30	30	050905
Nelaton för män	● 08	40	30	053485
	● 10	40	30	053505
	○ 12	40	30	053525
	● 14	40	30	053545
	● 16	40	30	053565
	● 18	40	30	053585
	● 20	40	25	053602
	● 22	40	25	053622
Tiemann för män	● 10	40	30	053805
	○ 12	40	30	053825
	● 14	40	30	053845
	● 16	40	30	053865
	● 18	40	30	053885
Luerlock Nelaton för män	● 08	40	30	052885
	● 10	40	30	052905
	○ 12	40	30	052925
	● 14	40	30	052945
	● 16	40	30	052965
Dilatation Nelaton	● 16	40	30	283165
	● 18	40	30	283185

## EasiCath® Set

Ett allt i ett tappningsset som består av en EasiCath kateter integrerad i en urinuppsamlingspåse tillsammans med en ampull koksalt (0.9%). Riv av fliken på påsen och töm innehållet genom öppningen. EasiCath Set är perfekt när man inte har tillgång till toalett, kranvatten eller inte vågar lita på vattenkvaliteten.



## EasiCath® Dilatation

Avsedd att användas vid dilatation (vidgning av urinröret). Katetern har inga ögon. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) och efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.

## EasiCath® Luerlock

En hydrofil tappningskateter med nelatonspets som är avsedd att användas för intra-vesikulär instillation. Kateterpåsen fylls med vanligt vatten eller steril koksaltlösning (NaCl) efter 30 sekunder har katetern fått en glatt yta och är klar att använda. Inget annat glidmedel behövs.



EasiCath® Set	Ch (storlek)	Längd (cm)	Volym (ml)	Förp (styck)	Coloplast art nr
Nelaton för män	● 08	40	700	20	280050
	● 10	40	700	20	280060
	○ 12	40	700	20	280070
	● 14	40	700	20	280080
	● 16	40	700	20	280090
	● 18	40	700	20	280100
Nelaton för män, stor påse	● 10	40	1200	20	280260
	○ 12	40	1200	20	280270
	● 14	40	1200	20	280280
	● 16	40	1200	20	280290
	● 18	40	1200	20	280300

### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söförförbränning med energutvinning.



Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-05.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 500 ex. SP2500

Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
Växel: 0300-332 50  
Kundservice: 0300-332 56  
se@coloplast.com  
www.coloplast.se