



## ViTri:Sårfilm med Dyna

### Produktbeskrivning:

ViTri:Sårfilm med dyna är ett transparent, semipermeabelt duschbart förband bestående av en tunn PU-film med latexfri häftmassa samt en ej vidhäftande sårdyna belagd med perforerad PE-film. Förbandet är permeabelt för ånga och syrgas. Ett oskadat förband skyddar täckt hudområde från utifrån kommande kontamination. Lätt absorptionskapacitet. Sterilt förpackade.

### Indikationer:

Används som förband postoperativt, vid sårskador och såromläggning där behov finns av ett duschbart förband.

### Kontraindikationer:

Avbryt användandet av förbandet om patienten är allergisk mot något av förbandets komponenter.

### Applikation:

Rengör såret samt omkringliggande hud. Avvakta applicering tills alla ev desinfektionsmedel eller hudskyddsmedel torkat. Innan applicering påbörjas böj förbandet vid pilmarkeringar där det 2:a skyddspappret skall avlägsnas för att underlätta avlägsnandet av 2:a skyddspappret efter applicering. Vidrör ej vidhäftningen. Drag av skyddspappret så att den vidhäftande ytan delvis frigörs, behåll greppet i skyddspappren mot vidhäftningsytan och påbörja applicering över området som skall täckas. Placera förbandet mitt över ytan som skall täckas. Drag skyddspappren åt vardera håll tills de helt avlägsnats. Stryk fast förbandet från mitten och utåt kanterna för att säkerställa att förbandet sluter tätt i kanterna, stryk extra runt kanterna för att säkerställa att de fäst ordentligt innan 2:a skyddspappret avlägsnas.

### Skötsel efter applicering:

Förbandet byts enligt gängse praxis på resp klinik alternativt om förbandets barriärskyddande egenskaper skadats, t ex punkterats eller har släppt i någon kant.

Artikelnummer	Beskrivning
802011	5 x 7 cm, med sårdyna, 100 st/fp, 1200 st/stor fp
802013	6 x 10 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 1200 st/stor fp
802014	9 x 10 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 1200 st/stor fp
802015	9 x 15 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 1200 st/stor fp
802016	10 x 20 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 1200 st/stor fp
802017	10 x 12 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 1200 st/stor fp
802018	10 x 25 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 750 st/stor fp
802019	10 x 30 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 750 st/stor fp
802020	10 x 35 cm, med sårdyna, 50 st/fp, 750 st/stor fp