

XTRATA

Transparant film med STRATAGEL teknologi




Enkel, säker och hudvänlig fixering

XTRATA



Applikationsguide:

1. Klipp till den längd som önskas.
 2. Ta bort pappersflikerna i mitten.
 3. Fäst filmen med lätt tryck.
 4. Ta bort pappersremarna på bågiga sidor.
 5. Lyft de blåfärgade flikarna i mitten av filmen.
- Filmerna är nu placerade.

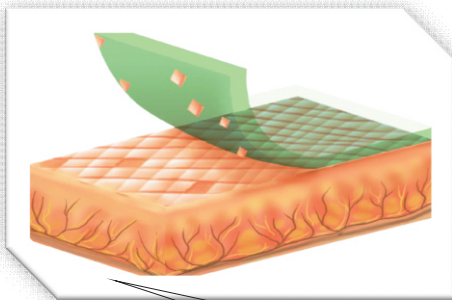


Xtrata är mycket hudvänlig och förorsakar inte skada på hudens översta lager, minimal friktion på huden genom dess unika stratagel-teknologi.

Användningsområde:
För kompresser, polyuretanförband som kräver fixering.
Utmärkt för sensitiva hudtyper som skintears.

Stratagel teknologi

Användning av XTRATA fixering bevarar känslig hud (-Stratum corneum) på ett skonsamt sätt. Gelen i tejen är integrerad i små reservoarer och frigörs strax efter applikation. Detta ger god häftningsförmåga utan hudirritation.

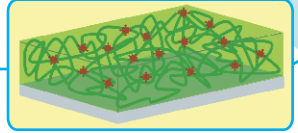


Enkelt att applicera

Enkel att applicera och man kommer inte i kontakt med ytan på tejen vid appliceringstillfället. Fungerar utmärkt med handskar.
Följ beskrivning.

Enkelt borttagande

Stratagel teknologin förenklar borttagandet och reducerar risken för hudirritation. Mindre smärta för patienten och liten risk för irritation på hudens översta lager.

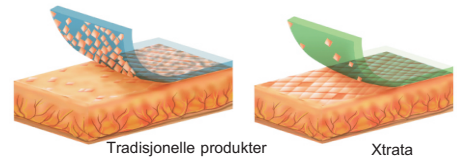

Hög MVTR

Kombination av Stratagel och polyuretanfilm ger en hög MVTR (Moisture Vapor Transmission rate) på 1200. Den semipermeabla filmen gör att den passar bra för fixering till polyuretanförband.



Latexfri

Xtrata innehåller inte Latex och är allergitestad.

Produkt information

Art.nr	Storlek	Rull/boks
H24R05	5cm x 10m	1
H24R10	10cm x 10m	1
H24R15	15cm x 10m	1

För ytterligare information kontakta
Irene Faager Berg
Telefon +46 73 84 87 300
E-mail irene@partnermed.se
Birgitta Thorin
Telefon +46 70 65 96 602
E-mail biggan@partnermed.no
E-post info@polymed.no