

XTRATA

Transparant film med STRATAGEL teknologi




Enkel, säker och hudvänlig fixering

XTRATA



Applikationsguide:

1. Klipp till den längd som önskas.
 2. Ta bort pappersflikerna i mitten.
 3. Fäst filmen med lätt tryck.
 4. Ta bort pappersremarna på bågiga sidor.
 5. Lyft de blåfärgade flikarna i mitten av filmen.
- Filmerna är nu placerade.

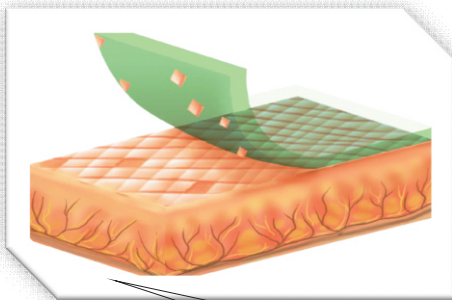


Xtrata är mycket hudvänlig och förorsakar inte skada på hudens översta lager, minimal friktion på huden genom dess unika stratagelteknologi.

Användningsområde:
För kompresser, polyuretanförband som kräver fixering.
Utmärkt för sensitiva hudtyper som skintears.

■ Stratagel teknologi

Användning av XTRATA fixering bevarar känslig hud (-Stratum corneum) på ett skonsamt sätt. Gelen i tejen är integrerad i små reservoarer och frigörs strax efter applikation. Detta ger god häftningsförmåga utan hudirritation.

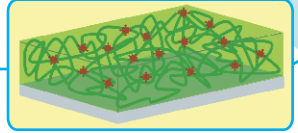


■ Enkelt att applicera

Enkel att applicera och man kommer inte i kontakt med ytan på tejen vid appliceringstillfället. Fungerar utmärkt med handskar.
Följ beskrivning.

■ Enkelt borttagande

Stratagel teknologin förenklar borttagandet och reducerar risken för hudirritation. Mindre smärta för patienten och liten risk för irritation på hudens översta lager.

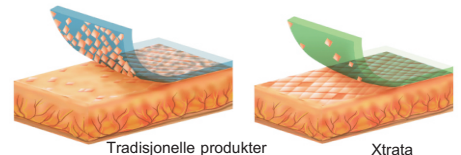

Tradisjonelle produkter

Xtrata

■ Hög MVTR

Kombination av Stratagel och polyuretanfilm ger en hög MVTR (Moisture Vapor Transmission rate) på 1200.
Den semipermeabla filmen gör att den passar bra för fixering till polyuretanförband.



■ Latexfri

Xtrata innehåller inte Latex och är allergitestad.

■ Produkt information

Art.nr	Storlek	Rull/boks
H24R05	5cm x 10m	1
H24R10	10cm x 10m	1
H24R15	15cm x 10m	1

För ytterligare information kontakta
Irene Faager Berg
Telefon +46 73 84 87 300
E-mail irene@partnermed.se
Birgitta Thorin
Telefon +46 70 65 96 602
E-mail biggan@partnermed.no
E-post info@polymed.no