

# WELLAND

## WBF®

### Hudskyddsbarriärfilm No Sting

**WBF050 /205726 Våtservett 1,7 ml, förp. 50 st**

Silikonbaserad, alkoholfri formulering i våtservett. Används på hud och längs sårkanter.

Bildar en mjuk, vattenavvisande och skyddande barriärfilm som andas. Barriärfilmen skyddar mot frätande ämnen, och förhindrar hudslitage vid täta byten av förband. WBF ger huden möjlighet att återhämta sig.

Mycket hudvänlig. Svider inte, och torkar inte ut huden. Torkar till en skyddande barriärfilm på några sekunder.

**Våtservetten innehåller** 1,7 ml aktiv beståndsdel (eng. siloxane copolymers). Welland WBF är helt silikonbaserad och innehåller inga tillsatsmedel, parfym eller liknande. Det är en inert substans som inte tas upp eller reagerar med huden. Silikonöverkänslighet är mycket ovanlig, och risken för hudreaktion är därför mycket liten. Våtservetten används för att stryka WBF på huden, längs sårkanter, på irriterad hud runt stomi eller vid inkontinens m.m. Medlet torkar på några sekunder och bildar en bra fästytta för bandage och häftor. Vid applicering underlättar WBF samtidigt avlägsnande från huden av gamla häftrester från tidigare förband.

**Welland WBF används inom följande områden:**

- **Stomivård**
- **Sårvård**
- **Barnsjukvård**
- **Geriatrik**
- **m.fl.**

#### BRUKSANVISNING

1. Rengör området som skall skyddas.
2. Ta ut våtservetten ur förpackningen. En liten *riv-anvisning* finns på ena sidan av förpackningen.
3. Stryk med våtservetten över området som skall skyddas.
4. WBF torkar på några sekunder och bildar en bra fästytta för nytt bandage eller häfta.



## Egenskaper

- Welland WBF bildar en långtidsverkande hudskyddsbarriärfilm.
- Welland WBF är särskilt lämplig för patienter med stomi av olika slag, vid hudirritation förorsakat av inkontinens, till uridombärande personer m.m.
- Welland WBF skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnande av häftor.
- Welland WBF underlättar också vid borttagning av häftor och häftrester från huden.
- Lösningemedlet avdunstar genast efter applicering och på några sekunder bildas en klar och mjuk hinna som andas.
- Barriärfilmen löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning.
- Welland WBF innehåller inte alkohol. Den orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud, och den torkar ej ut huden.
- Upprepad applicering kan ske utan risk för pålagring eller klistrighet. Hudskyddet blir mjukt och smidigt.
- Welland WBF liten våtservett innehåller 1,7 ml lösning.
- Welland WBF är enkel att använda, och lätt att ha med sig.
- Welland WBF är ekonomisk i användning.