

WELLAND

Adhesive Remover

Häftborttagningsmedel No Sting

Welland Adhesive Remover

Häftborttagningsmedel No Sting –
Silikonbaserad, alkoholfri formulering i sprayflaska och våtservett.

WAB050 /205650 Sprayflaska 50 ml.

WAD050 /205649 Våtservetter 1,9 ml, förp. 50 st.

BRUKSANVISNING för SPRAYFLASKA

- 1) Ta hatten av sprayflaskan och rikta sprutmunstycket mot kanten av häftan eller hudskyddsplattan.
- 2) Spraya riktat i liten mängd, och vänta några sekunder.
- 3) Lösgör häfta eller hudskyddsplatta.
- 4) Sätt på ny häfta eller hudskyddsplatta.

BRUKSANVISNING för VÅTSERVETT

- 1) Ta ut våtservetten ur förpackningen. En liten riv-anvisning finns på ena sidan av förpackningen.
- 2) Stryk med våtservetten över huden som skall rengöras (torkar på några sekunder).
- 3) Om du behöver ta bort häftrester och samtidigt få ett hudskydd kan du använda Welland WBF hudskyddsbarriärfilm.



FAKTA

Welland Adhesive Remover är ett synnerligen effektivt och skonsamt medel som underlättar avlägsnande av häftor och hudskyddsplattor. Det tar sig in under häftan och lösgör denna enkelt och smärtfritt. Det är av stort värde för personer med ömtålig eller skadad hud.

Welland Adhesive Remover är baserad på silikon. Medlet tas inte upp av kroppen och är skonsamt mot huden. Det innehåller inte alkohol och inga tillsatsmedel av något slag. Det svider inte och torkar inte ut huden.

Sprayen innehåller ingen drivgas, vilket innebär fördelar ur miljö- och brandsäker-hetsynpunkt.

Våtservetten är lämplig för att ta bort häftrester. Våtservetten kan också användas för att lösgöra själva häftan. Stryk med våtservetten längs kanten av häftan och fortsätt sedan stryka ren hela häftytan från häftrester.



Egenskaper

- Welland Adhesive Remover är effektivt för att avlägsna häftor. Detta gäller de allra flesta typer av häftor.
- Med Welland Adhesive Remover kan ny häfta eller hudskyddsplatta omedelbart fästas på huden igen.
- Welland Adhesive Remover tas inte upp av kroppen, och är mycket skonsam mot huden.
- Welland Adhesive Remover svider ej vid applicering på röd, irriterad eller skadad hud.
- Welland Adhesive Remover torkar mycket snabbt, och lämnar inga rester.
- Med Welland Adhesive Remover kan ett bandage som behöver korrigeras lösgöras och efter några sekunder åter fästas.
- Welland Adhesive Remover lämnar inga fläckar på textilier.
- Welland Adhesive Remover är ekonomisk att använda.