




Förebygg spridning av hudflora till såret

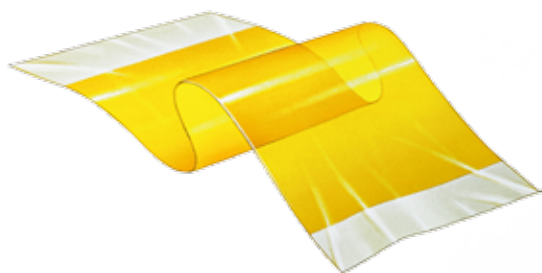

Den vanligaste källan till postoperativ sårinfektion är patienten själv. Den normala bakteriefloran på huden kan ge upphov till besvärliga infektioner om de kontaminerar operationssåret. Med en incisionsfilm upprättar man en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret.

loban™ 2 antimikrobiell incisionsduk

Med en incisionsfilm upprättar man en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, en organisk jodförening. Med loban™ 2 får du en steril arbetsyta direkt över sårytan genom att incisionsfilmen långsamt och kontrollerat frisätter fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt och den preoperativa hudinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under längre tid*. Filmen är semipermeabel, vilket betyder att den tillåter huden att andas men inte ger bakterier möjlighet att tränga igenom. Genom att huden tillåts andas genom incisionsfilmen säkerställs en förbättrad vidhäftning. Häftämnet på loban är detsamma som gjort Micropore™ känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning.

Applicering



Desinficera huden enligt gällande rutiner. Låt huden torka till dess att den är helt torr.



Två personer skall hjälpas åt att ta bort skyddspappret till dess att stoppmärket blir synligt.



Håll filmen över det tilltänkta incisionsstället utan sträckning (skall hänga i en båge).



Stryk på filmen, först längs det tilltänkta incisionsnittet med en steril handduk.



Stryk sedan försiktigt på den resterande delen, från incisionsstället.

Borttagande



Om hudförslutning sker intrakutant kan man låta incisionsfilmen sitta kvar tills det är dags att applicera förband.



Om hudförslutningen ej sker intrakutant; skapa ett veck i filmen genom att klämma filmen med pincett vid incisionskanten.



Vecket lossas från huden. Separera filmen från huden vid incisionskanten, upp till tre centimeter från huden. Fortsätt med förslutningen.



Lossa filmen från engångsdukar och lakan som är fästa vid den, genom att dra duken 180° bakåt, mot dig. Drag försiktigt med jämn kraft. Drag inte uppåt.

Material; Polyesterfilm

Häftämne; Akrylatbaserat, povidonjod (jodoform)

Tillverkningsland; USA

Hållbarhet; 2 år

Steriliseringmetod; Gammastrålning

*Johnston et al. Rate of bacterial recolonization of the skin after preparation: four methods compared

Beställningsinformation

| Art nr | Incisionsyta | Ant/fp | Fp/lev fp |
|--------|--------------|--------|-----------|
| 6635 | 10 x 20 cm | 10 | 4 |
| 6640 | 34 x 35 cm | 10 | 4 |
| 6648 | 56 x 60 cm | 10 | 4 |
| 6650 | 56 x 45 cm | 10 | 4 |
| 6651 | 56 x 85 cm | 10 | 4 |
| 6661EZ | 26 x 20 cm | 50 | 2 |
| 6640EZ | 35 x 35 cm | 10 | 4 |
| 6648EZ | 60 x 60 cm | 10 | 4 |
| 6650EZ | 60 x 45 cm | 10 | 4 |
| 6651EZ | 60 x 85 cm | 10 | 4 |

3M

Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se