



Aktivt självvärmande filt

Filten uppnår sin arbetstemperatur inom 30 minuter och bibehåller en genomsnittlig temperatur på 44°C upp till 10 timmar. Under varje värmekudde uppnår temperaturen på huden max 42°C.

- Hjälper till att förhindra hypotermi i den perioperativa miljön
- Enkel och snabb hantering
- Lätt att använda före, under och efter operation för enkel och effektiv uppvärmning av patienten
- Lättillgänglig till fler patienter eftersom ingen ytterligare utrustning behövs
- Innovativ design som gör det möjligt att dela filtens för att täcka såväl över- som underkropp



Bruksanvisning



1. Öppna förpackningen genom att riva plasten vid fliken i övre vänstra hörnet. Ta ut filten ur den skyddande förpackningen för att exponera BARRIER® EasyWarm®+ för luft.



2. Öppna och lägg ut BARRIER EasyWarm+ helt, filten får inte vikas dubbel. När filten exponeras för luft når den sin optimala effekt efter cirka 30 minuter och bibehåller sin temperatur upp till 10 timmar. Medeltemperaturen under värmekuddarna är 44°C. Under varje värmekudde uppnår temperaturen på huden max 42°C.



3. Placera BARRIER EasyWarm+ med värmekuddarna uppåt med den vita sidan av filten mot patienten.



4. Preoperativt och postoperativt kan BARRIER EasyWarm+ läggas som helkroppstäck över hela patienten. Likaså under operation vid ingrepp på händer, armar och huvud.



5. För kirurgiska ingrepp i nedre delen av buken och nedre extremiteterna, dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den övre delen av filten över armar och bröst.



6. För kirurgiska ingrepp ovanför underlivet dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den nedre delen av filten över ben och höft.



7. Vid bukkirurgi dela på BARRIER EasyWarm+ och applicera den övre delen över armar och bröst och den nedre delen över ben och höft.



8. Filten övre och undre del kan lätt tas isär och återfästas via kardborrband. Den nedre delen kan delas i ytterligare två delar genom att man klipper den vid angiven linje. Detta gör det möjligt att anpassa filten till olika kirurgiska ingrepp.

Allmän information

- Filten får inte vikas dubbel.
- Tag bort filten vid röntgen/ gemonlysning av operationsområdet samt vid MR då värmekuddarna ej är genomlysningbara.
- Applicera ALLTID BARRIER EasyWarm+ med värmekuddarna från patienten (uppåt).
- Skall hanteras under överinseende av vårdgivare.



- Undvik kontakt med öppna sår och skadad hud, skall ej användas på frostsador.
- Hos patienter med nedsatt känsel eller reaktionsförmåga samt begränsad förmåga att ge och ta emot information, bör huden övervakas regelbundet i enlighet med sjukhusets riktlinjer.
- Efter användning kastas BARRIER EasyWarm+ som vanligt avfall.
- Kan brännas.

Försiktighetsåtgärder

- Filten är en aktiv terapeutisk enhet och ska hanteras enligt givna instruktioner för att undvika eventuella termiska skador.
- Undvik användning av filten hos patienter som behandlas i tryckkammare.
- Filten är inte avsedd att användas på barn.

Art. nr.	Beskrivning
629910	<p>BARRIER EasyWarm+ aktivt självvärmande filt</p> <p>Produkt: 12 luftaktiverade värmedyner (13 cm x 10 cm) integreras i fickorna på det övre lagret. Filten storlek är 110/150x200 cm.</p> <p>Material: Flera lager SMMM (polypropen). De olika lagren och fickorna sys med polyester / bomullstråd. Värmedynerna är tillverkade av luftgenomsläppliga påsar som innehåller aktivt kol, lera, salt och järnpulver.</p> <p>Förpackning: vakuumpförpackade i en lufttät polymerpåse. Påsarna (7 st.) är förpackad i en transport kartong med bubbelplast.</p> <p>TRP: 7 st</p>

Operationsläge

BARRIER EasyWarm+ är utformad för att vara flexibel och passa för många olika typer av kirurgiska ingrepp. Se nedan förslag på hur man placerar filten för några av de vanligaste kirurgiska ingreppen.



Bukkirurgi



Laparoskopisk kirurgi



Knäkirurgi



Axelkirurgi



Axelkirurgi



Ryggkirurgi



Urologi/gynekologi kirurgi



Urologi/gynekologi kirurgi



Urologi/gynekologi kirurgi



Höftkirurgi



Höftkirurgi



ENT kirurgi



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg.
Telefon 031-722 30 00, fax 031-722 34 01. www.molnlycke.com

Namnen Mölnlycke Health Care, BARRIER® och EasyWarm+® samt deras respektive logotyper är globalt registrerade och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. Copyright (2012).

