


# MINI-PEP

## Andningstränare med munstycke eller mask

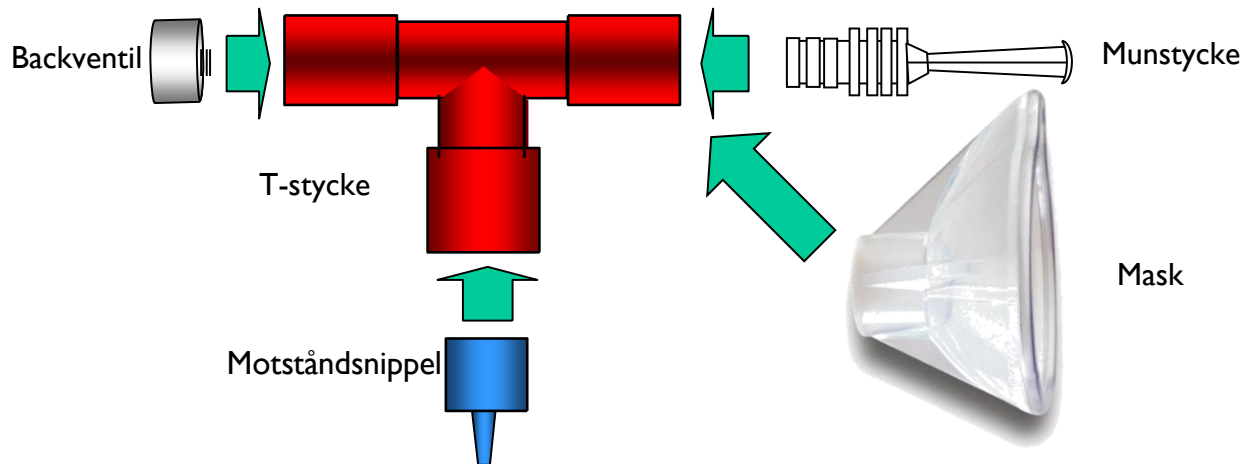

PEP-andning används t.ex. för att hjälpa till med syresättningen av patienter efter operationer men också som en hjälp mot slemproblem hos patienter med akuta och kroniska sjukdomar. **MINI-PEP** är ett enkelt hjälpmedel för förebyggande och aktiv behandling hos dessa patientgrupper.

### Princip:

När man andas ut mot ett motstånd (nippeln) och får ett expiratoriskt övertryck (PEP), öppnas stängda kanaler i lungorna och alveolerna hålls "uppblåsta". Detta bidrar till ökad syresättning. Med olika andnings- och hosttekniker kan man efter PEP-andning lättare få upp slem från lungorna hos de patienter där detta är ett problem.

Rengöring av systemet: **MINI-PEP** demonteras enkelt och rengörs i ljummet vatten med mild tvällösning eller diskmedel. Systemet bör inte kokas och är endast avsett för en-patientsbruk. Före varje användande skall man kontrollera att alla delar är hela och utan sprickor. Om membranet på backventilen är deformerat skall ventilen bytas.

**MINI-PEP** kan användas antingen med munstycke eller med mask. Med mask, **MINI-PEP<sup>mask</sup>**, kan den fås med **tre olika maskstorlekar**; small som passar barn upp till ca. 18 månaders ålder, medium för barn mellan 18 månader till 6 år, samt large för patienter från 6 år till vuxna. Till **MINI-PEP<sup>mask</sup>** köps motståndsnippeln separat enl. beställningsinformationen på baksidan. Detta ger en mycket stor flexibilitet till klinikerna.

### MINI-PEP

Ett komplett MINI-PEP-system består av flera komponenter som är delar från det så kallade System 22.

Exempel: **MINI-PEP 25** (komplett med nippel med 2,5 mm öppning)

I st. 1003E	Munstycke
I st. 1920E	Backventil
I st. 2543EA	T-stycke
I st. TB10.0025	Nippel 2,5 mm

## MINI-PEP kan beställas enligt följande:

Art. nummer	Benämning
<b>MINI-PEP med munstycke komplett inkl. motståndsnipplar, förp. om 10 st.</b>	
DO20.1015	MINI-PEP15, 10/fp. Komplet med 1,5 mm nipplar
DO20.1020	MINI-PEP20, 10/fp. Komplet med 2,0 mm nipplar
DO20.1025	MINI-PEP25, 10/fp. Komplet med 2,5 mm nipplar
DO20.1030	MINI-PEP30, 10/fp. Komplet med 3,0 mm nipplar
DO20.1035	MINI-PEP35, 10/fp. Komplet med 3,5 mm nipplar
DO20.1040	MINI-PEP40, 10/fp. Komplet med 4,0 mm nipplar
DO20.1045	MINI-PEP45, 10/fp. Komplet med 4,5 mm nipplar
DO20.1050	MINI-PEP50, 10/fp. Komplet med 5,0 mm nipplar
<b>Mini-PEP med munstycke men utan motståndsnippel</b>	
DO20.2000	Mini -PEP, utan motståndsnippel (förpackning om 10 st.)
DO20.2200	Mini -PEP, utan motståndsnippel (förpackning om 20 st.)
<b>Mini-PEP<sup>kalibrering</sup> Kit för kalibrering av motståndsnippel till Mini-PEP, 1 st.</b>	
DO20.5000	Kalibreringskit för Mini-PEP
<b>Mini-PEP<sup>mask</sup> med mask men utan motståndsnippel, förpackning om 4 st.</b>	
DO20.6000	MINI-PEP <sup>mask</sup> andningstränare med Small mask (barn <1 ½ år), utan motståndsnippel, 4/fp.
DO20.7000	MINI-PEP <sup>mask</sup> andningstränare med Medium mask (barn 1 ½-6 år), utan motståndsnippel, 4/fp.
DO20.8000	MINI-PEP <sup>mask</sup> andningstränare med Large mask (barn 6år-vuxen), utan motståndsnippel, 4/fp.
<b>Separata delar</b>	
I003E	Munstycke
I920E	Backventil
2543EA	T-stycke rött, med skyddsgaller
TB15-D	Motståndsnippel, 1,5 mm till andningstränare, svart
TB20-W	Motståndsnippel, 2 mm till andningstränare, vit
TB25-Y	Motståndsnippel, 2,5 mm till andningstränare, gul
TB30-B	Motståndsnippel, 3 mm till andningstränare, blå
TB35-G	Motståndsnippel, 3,5 mm till andningstränare, grön
TB40-O	Motståndsnippel, 4 mm till andningstränare, orange
TB45-M	Motståndsnippel, 4,5 mm till andningstränare, rosa
TB50-C	Motståndsnippel, 5 mm till andningstränare, röd
<b>Separata delar enl. ovan kan endast beställas i jämna 10-tal per art. nummer, dvs. 10, 20, 30 osv.</b>	
I041095	Inhalationsmask tät, Barn, Small, 1 st.
I041083	Inhalationsmask tät Barn, Medium, 1 st.
I041082	Inhalationsmask tät vuxen, Large, 1 st.

För ytterligare information, kontakta Dolema AB på nedanstående telefon eller adress.

Broschyrutgåva: 2016-04-25-v2

Dolema förbehåller sig rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande.