


MINI-PEP

Andningstränare med munstycke eller mask

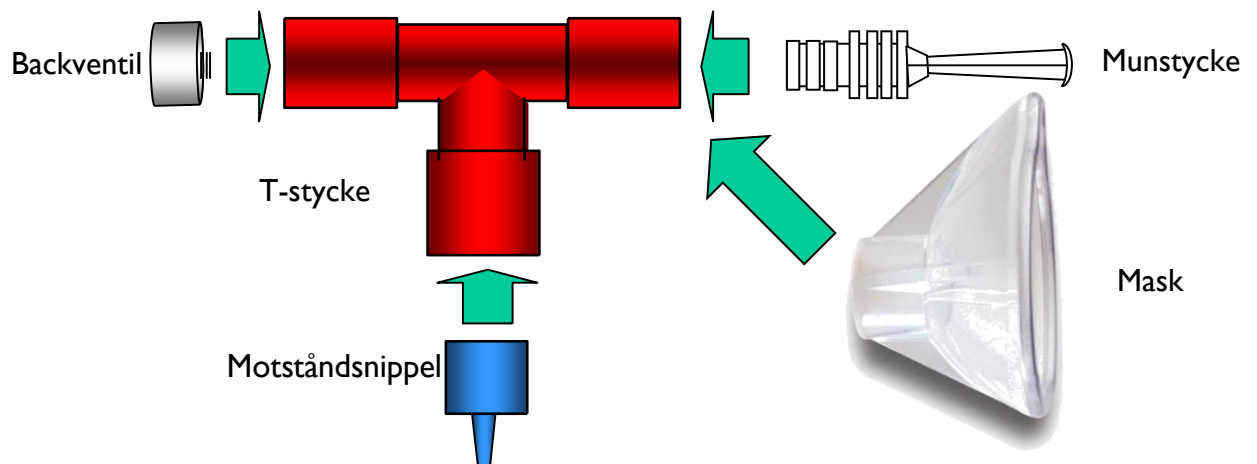

PEP-andning används t.ex. för att hjälpa till med syresättningen av patienter efter operationer men också som en hjälp mot slemproblem hos patienter med akuta och kroniska sjukdomar. **MINI-PEP** är ett enkelt hjälpmedel för förebyggande och aktiv behandling hos dessa patientgrupper.

Princip:

När man andas ut mot ett motstånd (nippeln) och får ett expiratoriskt övertryck (PEP), öppnas stängda kanaler i lungorna och alveolerna hålls "uppblåsta". Detta bidrar till ökad syresättning. Med olika andnings- och hosttekniker kan man efter PEP-andning lättare få upp slem från lungorna hos de patienter där detta är ett problem.

Rengöring av systemet: **MINI-PEP** demonteras enkelt och rengörs i ljummet vatten med mild tvålösning eller diskmedel. Systemet bör inte kokas och är endast avsett för en-patientsbruk. Före varje användande skall man kontrollera att alla delar är hela och utan sprickor. Om membranet på backventilen är deformerat skall ventilen bytas.

MINI-PEP kan användas antingen med munstycke eller med mask. Med mask, **MINI-PEP^{mask}**, kan den fås med **tre olika maskstorlekar**; small som passar barn upp till ca. 18 månaders ålder, medium för barn mellan 18 månader till 6 år, samt large för patienter från 6 år till vuxna. Till **MINI-PEP^{mask}** köps motståndsnipplarna separat enl. beställningsinformationen på baksidan. Detta ger en mycket stor flexibilitet till klinikerna.

MINI-PEP

Ett komplett MINI-PEP-system består av flera komponenter som är delar från det så kallade System 22.

Exempel: **MINI-PEP 25** (komplett med nippel med 2,5 mm öppning)

I st. 1003/E	Munstycke
I st. 1920E	Backventil
I st. 2543EA	T-stycke
I st. TB10.0025	Nippel 2,5 mm

MINI-PEP kan beställas enligt följande:

Art. nummer	Benämning
MINI-PEP	med munstycke komplett inkl. motståndsnipplar, förp. om 10 st.
DO20.1015	MINI-PEP15, 10/fp. Komplet med 1,5 mm nipplar
DO20.1020	MINI-PEP20, 10/fp. Komplet med 2,0 mm nipplar
DO20.1025	MINI-PEP25, 10/fp. Komplet med 2,5 mm nipplar
DO20.1030	MINI-PEP30, 10/fp. Komplet med 3,0 mm nipplar
DO20.1035	MINI-PEP35, 10/fp. Komplet med 3,5 mm nipplar
DO20.1040	MINI-PEP40, 10/fp. Komplet med 4,0 mm nipplar
DO20.1045	MINI-PEP45, 10/fp. Komplet med 4,5 mm nipplar
DO20.1050	MINI-PEP50, 10/fp. Komplet med 5,0 mm nipplar
Mini-PEP	med munstycke men utan motståndsnippel
DO20.2000	Mini -PEP, utan motståndsnippel (förpackning om 10 st.)
DO20.2200	Mini -PEP, utan motståndsnippel (förpackning om 20 st.)
Mini-PEP^{kalibrering}	Kit för kalibrering av motståndsnippel till Mini-PEP, 1 st.
DO20.5000	Kalibreringskit för Mini-PEP
Mini-PEP^{mask}	med mask men utan motståndsnippel, förpackning om 4 st.
DO20.6000	MINI-PEP ^{mask} andningstränare med Small mask (barn <1½ år), utan motståndsnippel, 4/fp.
DO20.7000	MINI-PEP ^{mask} andningstränare med Medium mask (barn 1½-6 år), utan motståndsnippel, 4/fp.
DO20.8000	MINI-PEP ^{mask} andningstränare med Large mask (barn 6år-vuxen), utan motståndsnippel, 4/fp.
Separata delar	
I003/E	Munstycke
I920E	Backventil
2543EA	T-stycke rött, med skyddsgaller
TB10.0015	Motståndsnippel 1,5 mm
TB10.0020	Motståndsnippel 2,0 mm
TB10.0025	Motståndsnippel 2,5 mm
TB10.0030	Motståndsnippel 3,0 mm
TB10.0035	Motståndsnippel 3,5 mm
TB10.0040	Motståndsnippel 4,0 mm
TB10.0045	Motståndsnippel 4,5 mm
TB10.0050	Motståndsnippel 5,0 mm
Separata delar enl. ovan kan endast beställas i jämna 10-tal per art. nummer, dvs. 10, 20, 30 osv.	
I041095	Inhalationsmask tät, Barn, Small, 1 st.
I041083	Inhalationsmask tät Barn, Medium, 1 st.
I041082	Inhalationsmask tät vuxen, Large, 1 st.

För ytterligare information, kontakta Dolema AB på nedanstående telefon eller adress.

Broschyrutgåva: 2014-02-19

Dolema förbehåller sig rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande.