

# Actimove® Mitella Eco

Armslinga



- Bekväm att använda
- Enkel applicering
- Lätt att justera

# Actimove® Mitella Eco

## Armslinga

Actimove® Mitella Eco är en armslinga som är bekväm och enkel att använda. Armslingan kan lätt justeras med hjälp av kardborrfästen. Materialet är av icke-töjbart skum för säker klinisk positionering av armen.

### Indikationer

- Kroniska och neurologiska tillstånd
- Efter traumaskador och mjukdelsskador


### Egenskaper och fördelar

- Stödjer den skadade övre extremiteten
- Justerbar rem av icke-töjbart skum för säker klinisk positionering av armen
- God komfort med mitellans lättviktsfodral samt mjuk nackrem
- Enkel applicering och borttagning tack vare kardborreförslutning
- Genom att föra in tummen i den inbyggda mjuka tumöglan hindras armen från att glida ur läge


### Användning

1. Placera armbågen i slingans ficka.
2. Applicera nackbandet över ryggen och till den motsatta axeln, mata den fria änden av bandet genom ringen.
3. Fäst kordborrfästet.
4. Placera tummen i tumgreppet om så önskas.

För att applicera slingan omlott på ett korrekt sätt, se till att handen befinner sig något över armbågensnivå.

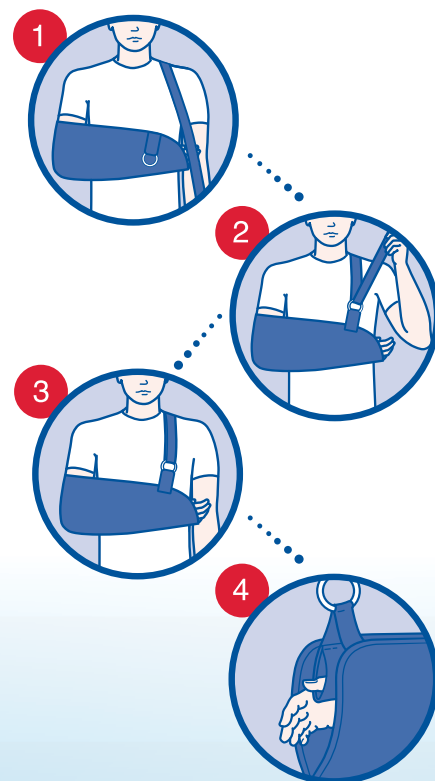

## Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek		Antal/fp
72819-57	Small	34–38 cm	1 st
72819-58	Medium	37–43 cm	1 st
72819-59	Large	42–48 cm	1 st
72819-60	X-Large	> 48 cm	1 st

