



SÅRBEHANDLING  
INTENSIVVÅRD  
STOMIVÅRD  
UROLOGI  
OPERATION  
FIXATION

# KALTOSTAT®

Förband med blodstillande effekt<sup>1</sup>




KALTOSTAT® är ett alginat förband som kan användas för måttligt till kraftigt vätskande sår. KALTOSTAT® appliceras på såret och täcks med ett fuktighetsbevarande förband, t ex DuoDERM® Extra Thin förband eller DuoDERM® Signal™ förband. Förbandet har en blodstillande effekt<sup>1</sup>, vilket innebär att det med fördel kan användas på mindre lättblödande sår eller tagställen. KALTOSTAT® finns också som band, vilket underlättar applicering i sårhål. Förbandet är enkelt att använda, mjukt, formbart och ger en hög patientkomfort.



**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*

# KALTOSTAT®

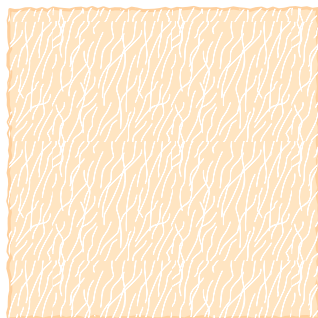

**NATURLIG SÅRLÄKNING**  
80 % kalciumalginat och  
20 % natriumalginat.

**SKONSAM SÅRLÄKNING**  
Fibrerna omvandlas till en  
mjuk gel som ger en gynnsam  
läkningsmiljö.

## BEVARAR EN FUKTIG SÅRLÄKNINGSMILJÖ

KALTOSTAT® bevarar en fuktig miljö i såret och avlägsnas lätt. KALTOSTAT® finns som kompresser i fyra olika storlekar och som vadd, som underlättar applicering av förbandet i sårhål.

## BEHAGLIG FÖR PATIENTEN

KALTOSTAT® består av 80 % kalciumalginat och 20 % natriumalginat och är en ren naturprodukt. När KALTOSTAT®-materialet kommer i kontakt med sårsekret eller blod omvandlas alginatet till en mjuk gel. I denna process binder materialet stora mängder vätska.

## HAR EN BLODSTILLANDE EFFEKT<sup>1</sup>


I kontakt med blod ger KALTOSTAT® en blodstillande effekt, vilket innebär att det med fördel kan användas på mindre lättblödande sår eller tagställen.

### KALTOSTAT®

Storlek	Förb/Förp	Kod	Best.nr.
5 x 5 cm	10 st	168210	845248
7,5 x 12 cm	10 st	168212	845255
10 x 20 cm	10 st	168214	844696
15 x 25 cm	10 st	168215	844704

### KALTOSTAT BAND för sårkaviteter

2 gram	5 st	168117	845263
--------	------	--------	--------

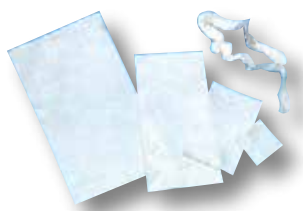

## FAKTA

### KALTOSTAT®

KALTOSTAT® är ett vitt, mjukt och sterilt non-woven sårförband bestående av kalcium-natrium alginatfibrer.

Alginatfibrerna absorberar sårexudat och omvandlas till en sammanhängande gel. Gelen skapar en fuktig sårläkningsmiljö. Förbandet kan enkelt avlägsnas från såret.

### INDIKATIONER

KALTOSTAT® kan användas för måttligt till kraftigt vätskande sår, t ex trycksår, venösa och arteriella bensår, diabetes-sår, tagställen, skrapsår, rivsår, mindre brännskador, postoperativa kirurgiska sår och traumatiska sår. KALTOSTAT® kan användas på infekterade sår under medicinskt överseende.

### BYTESINTERVALL

Upp till sju dagar eller så byts förbandet när det är mättat.

### FÖRVARING

Förvaring sker torrt i rumstemperatur. Undvik starkt ljus.

### STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserad.

### KLASSIFICERING

Kaltostat® är CE-märkt och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

### HÅLLBARHET

3 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen.



**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*

ConvaTec (Sweden) AB  
Box 15 138  
167 15 Bromma  
Sweden  
ConvaTec kundservice:  
Tel: 020-21 22 22  
Fax: 08-704 89 98  
E-mail: convatec.kundeservice@convatec.com  
www.convatec.com

Referens: 1. R.H. Joy et al. A new calcium alginate haemostatic dressing. Dental Practice, February issue;16:1989.