

Nållancett

för kapillärprovtagning



- Säker för användare och patient - kan ej återanvändas
- Steril
- Enkel att använda – säkrad avfyrningsanordning eliminerar risken för oavsiktlig aktivering
- Greppvänlig – tre möjliga grepp
- Bra precision – har en liten anläggningsyta
- Trippelslipad nål för att minska smärta
- CE- märkta

Bruksanvisning:



1. Vrid av skyddslocket genom att vrida $\frac{1}{4}$ varv
2. Tryck Safety Lancet fast mot den utvalda och rengjorda punktionsytan och tryck på avtrycksknappen (uppstår klick ljud)
3. Kasta genast den använda lansetten i därför avsedd behållare

Sarstedt AB, artikelnr: 85.1016

Tre valfria grepp:



Aktivering med tummen



Aktivering med pekfinger



Benämning:	Blodvolym:	Art.nummer:	Inner / ytterfp:
Nållancett, grön, stickdjup 1,8 mm, 21 G	Normalflöde ~ 50-100µl	85.1016	200 / 1200