

Provox FreeHands FlexiVoice ger dig frihet att prata utan att behöva hålla för med händerna!



Tal och andning

- En talventil där du inte behöver använda händerna och som även ger lungrehabilitering.

Flexibelt val för maximal frihet

- Välj lätt, medium eller starkt membran som passar luftflödet och trycket som du behöver för att tala och andas.
- Tal med fria händer eller med manuell ocklusion – båda alternativen är möjliga utan att du behöver byta enhet eller inställningar.
- Val av HME – Provox FreeHands HME Moist eller Provox FreeHands HME Flow beroende på dina befuktningbehov och tolerans för andningsmotstånd.

Lätt att använda

- Click and Go – Talventilen sätts fast i HME-kassetten med bara ett klick.
- Enkelt HME-byte – Placera Removal Aid (borttagningshjälpmedel) runt HME kassetten, tryck ihop den och ta bort HME kassetten.
- Hostfunktion – Vid hosta hoppar membranet ut genom framsidan på ventilen och kan enkelt tryckas tillbaka.

Diskret utseende och känsla

- Lätt med låg profil och diskret färg.
- Arch (båge) förhindrar oavsiktlig ocklusion av talventilen av kläder eller haka.

Beställningsinformation	REF
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 2 Arches (bågar) + 1 st. HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 30 st. Provox FreeHands HME kassetter + 1 bruksanvisning	7757
Provox FreeHands FlexiVoice Set: 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 2 st. Arches (bågar) + 1 st. HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	7760
Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt): 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt) + 1 st. Arch (båge) + 1 st. HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8161
Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium): 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium) + 1 st. Arch (båge) + 1 st. HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8162
Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark): 1 st. Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark) + 1 st. Arch (båge) + 1 st. HME Removal Aid (borttagningshjälpmedel) + 1 bruksanvisning	8163
Provox FreeHands HME Moist**: 30 st. HME kassetter	8220
Provox FreeHands HME Flow: 30 st. HME kassetter	8221

** Provox FreeHands HME Moist är inte tillgänglig i alla länder.

ATOS
MEDICAL
Leading the way in ENT

Atos Medicals produkter och expertkunskap utvecklas i nära samarbete med ledande institutioner, läkare, forskare, logopedier och patienter över hela världen. Alla fakta och argument bygger på resultat från kliniska studier. 1987 började Atos Medical utveckla den första Provox-röstventilen. Vi har sedan dess arbetat intensivt för att utveckla Provox till att bli marknadens ledande system för röst- och lungrehabilitering. Vi fortsätter med att avsätta väsentliga resurser för produktutveckling och utbildningsprogram inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Vi har ett tydligt mål: Atos Medical ska fortsätta att vara ledande inom ÖNH.

Huvudkontor:
Atos Medical AB, Kraftgatan 8, P.O. Box 183,
242 22 Hörby
Tel: 0415-198 00, Fax: 0415-198 98
kundtjanst@atosmedical.com, www.atosmedical.se
© Atos Medical AB, Sverige. 201410A, REF 7882SV

PROVOX® FreeHands FlexiVoice™



Svenska

ATOS
MEDICAL
Leading the way in ENT

PROVOX® FreeHands FlexiVoice™

En talventil och fukt- och värmeväxlare (HME, Heat and Moisture Exchanger) med både automatisk och manuell ocklusion

Det är mycket viktigt att kunna tala igen efter en total laryngektomi. Alternativen och valmöjligheterna ökar när fler uppfinningsrika lösningar blir tillgängliga. Med Provox FreeHands FlexiVoice kan du tala utan att behöva hålla för med händerna och du kan också använda manuell ocklusion. Förmågan att kunna tala och samtidigt få lungrehabilitering är oundgänglig.

I en ny klinisk studie kunde mer än 90 % av användarna tala utan att behöva använda händerna med Provox FreeHands FlexiVoice. Ungefär hälften av användarna använder den varje dag.*

* Data på fil.

Flexibelt val för maximal frihet

Olika dagliga aktiviteter har olika krav på en talventil. Med Provox FreeHands FlexiVoice kan du därför välja mellan tre olika styrkor: lätt, medium och stark. Valet beror på hur mycket luftflöde och lufttryck du behöver vid tal och andning. Du kan använda olika styrkor i olika situationer.

Provox FreeHands FlexiVoice har också ett låst läge där membranet inte stängs. Det kan vara användbart vid fysisk aktivitet och tyngre andning. I låst läge går det fortfarande att tala med manuell ocklusion.



Lätt membran
1 punkt



Medium membran
2 punkter



Starkt membran
3 punkter

Provox FreeHands FlexiVoice består av två delar:

1. En återanvändbar talventil med tre olika styrkor som är lätta att skilja åt med hjälp av punkterna som du kan se och känna.
2. Provox FreeHands HME för engångsbruk som värmer upp och befuktar den inandade luften.

Provox StabiliBase plåster för tal med båda händerna fria

Det finns en rad olika Provox tillbehör som kan användas tillsammans med Provox FreeHands FlexiVoice. Testa Provox StabiliBase för extra stabilitet och stöd när du talar med fria händer.



”För mig är det också viktigt att kunna uttrycka mig med båda händerna.”

– Maria Abaitua



”När man arbetar som bilmekaniker med gamla bilar är det viktigt att kunna använda båda händerna och prata med andra i verkstaden.”

– José Ramírez Mateos



”När jag tränar på gymmet behöver jag verkligen fria händer.”

– José González de Sebastián

Använd Provox XtraMoist HME för bäst befuktning på natten

Befuktning är alltid viktig. Använd en Provox XtraHME på natten när du inte kan använda talventilen. Testa Provox XtraMoist HME, den har bäst befuktningsegenskaper.