

3M Science.
Applied to Life.™



Unik bladdesign, överlägsen prestanda

3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681
för användning med 9680 blad

3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681

Klipp säkert.



3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681 kombinerar en överlägsen design och prestanda för att minska risken för postoperativ infektion och för att effektivisera arbetsflödet, vilket underlättar för både personal och patient.

En överblick

- 120 minuters klipptid
- Endast 4 timmars laddningstid
- Utformningen på bladet förhindrar risken för att huden dras in i bladet
- Bladets position är riktat bort från huden vilket minimerar risken för skärsår
- Avlägsnar alla typer av huvud- och kroppshår – fint eller grovt, vått eller torrt
- Batteriladdningsindikation



Unik bladdesign, överlägsen prestanda

9680 bladet (som inväntar patent) är unikt utformat för att förhindra risken för huden att dras in i bladet. I kombination med att bladets position är riktat bort från huden, ger 3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681 en överlägsen prestanda.

Batteristyrka

Drivet av ett litium jon (Li-jon) batteri, ger 3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681 120 minuters klipptid, med 4 timmars återladdning. Till skillnad från nickel-metall hydrid (NiMH) batterier, har Li-jon batterier ingen minneseffekt. Detta innebär att Clippern alltid kör på full styrka, även då den inte är fulladdad, och kan förvaras i laddningsenheten utan att det förkortar batteriets livslängd.

Ett blad

Bladet 9680 är effektivt både vid standardklippning och trauma och för alla typer av huvud- och kroppshår, inklusive känsliga kroppsområden. Att det bara krävs ett typ av blad underlättar standardiseringen av håravkortningsprocessen på kliniken samt även lagerhållningen av blad.


Användning

Byta blad



Sätta fast

Avlägsna skyddspappret från förpackningen. Utan att vidröra bladet, håll Clipperapparaten över bladet och fäst det tills det klickar.

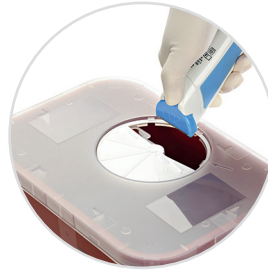

Avlägsna

Håll bladet nedåt, över avfallsbehållaren för vassa föremål, och tryck på frigöringsknappen med tummen.

NOTERA: Använd alltid ett nytt blad till varje patient för att undvika korskontaminering.

Klippa



Framåt

Håll Clippern som en penna med bladet plant eller med en liten vinkel mot huden. Skjut Clipperbladet försiktigt framåt mot patientens hårriktning.

NOTERA: Använd inte för högt tryck mot patientens hud.



Bakåt

Håll Clippern med bladet plant eller med en liten vinkel mot huden och dra Clippern försiktigt mot dig.

NOTERA: Skrapa inte bladet mot patientens hud. Clippern kommer inte att klippa håret om den används felaktigt.

Rengöring



Skölj

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, skölj Clipperapparaten under varmt rinnande vatten. Torka noga innan laddning eller användning.



Torka

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, torka av Clipperapparaten med en torkduk med alkohol/ desinfektionsmedel.



Blötläggning

Med Clippern avstängd och bladet avlägsnat, blötlägg Clipperapparaten i desinfektionslösning. Torka noga innan laddning eller användning.

NOTERA: Blötlägg ej Clipperapparaten i vatten eller annan lösning djupare än 15 cm eller under längre tid än 15 min.

Laddning



Ladda

Ladda Clippern i 4 timmar innan första användningen. Förvara Clippern avstängd i den anslutna laddningsenheten efter varje användning. Clippern ger 120 minuters sladdlös klipptid med 4 timmars laddning.

När Clippern är fulladdad är de översta tre LED ljusen gröna och de nedersta två gula. När batteriet behöver laddas kommer det nedersta LED ljuset att blinka. Under laddningen blinkar LED ljusen. Nivån på laddningen kan fastställas via ljusblinkningen vid det tillfället.

Se bipacksedeln för varningar och mer detaljerade instruktioner.

Form och Funktion

3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681

Funktion	3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681 9680 blad
Huvudhår	Ja
Klippbredd	36.4 mm
Blad	Enhandsfunktion av/på
Clipperbladsriktning	Bort från huden
Hastighet	356 mm/sek ¹
Sladdlös användartid	~120 min
Laddningstid	4 timmar
Överladdningsskydd	Ja
Rengöring	Skölj/doppa i vatten/desinficera
Halkfritt grepp	Ja
Batterityp	Li-jon
Garanti	2 år



¹⁾ 3M Health Care, Data on file

Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Antal st/fp	Antal fp/lev fp
9680	3M™ Clipper Professional blad 9680	50	1
9681	3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681	1	1
9683	3M™ Clipper Professional laddare för 9681: 9683	1	1
9687E	3M™ Clipper Professional startkit (inkluderar 9681 + 9683)	1	1

För mer information om 3M™ Clipper Professional kirurgisk klippapparat 9681 eller andra 3M Health Care produkter, kontakta din lokala 3M representant eller besök www.3Mhealthcare.se



3M Svenska AB
Health Care Business
S-191 89 Sollentuna

Telefon 08-92 21 00
Fax 08-92 22 89
www.3Mhealthcare.se

3M är varumärke från 3M. Lämnas till återvinning.
Tryckt i Danmark © 3M 2019. Alla rättigheter
förbehålles.
BR531081-4SE190320 / ht000001039