



Lakansskydd Kameleont

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Det blå ytskiktet indikerar med en färgförändring att lakansskyddet blivit blött. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är av blå lakansväv av polyester/bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskydden har bäddflikar för att fixera skyddet runt madrassen.



Bruksanvisning

Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen. Observera att produkten inte är avsedd att lyfta personer med.

Sanicare art nr	B17136
Antal produkter/förpackning, st	3
Vikt per produkt, g	550
Totalyta, cm	85x190
Liggytan, cm	85x90
Material liggytan	50%Polyster/50%bomull
Material undersida	polyester
Bäddflikar	Polyester, bomull
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	Laminerat, rayon, polyester

Tvättråd



90°C (ej blekmedel, sköljmedel eller kemtvätt), kan torktumlas på låg värme. Klarar c:a 450 tvättar (hushållstvätt). Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage **skall produkten kasseras**.
Produkten inte är avsedd att lyfta personer med.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

sanicare