


## Bruksanvisning

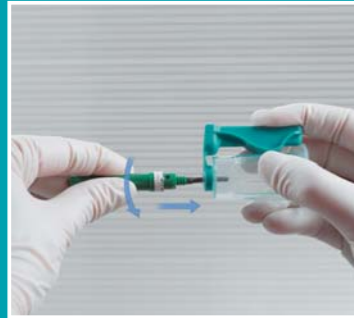

1\* Skruva i kanylen



2 Ta bort skyddshylsan

\* Detta steg gäller inte för QUICKSHIELD Komplet och Komplet PLUS.



3 Venprovtagning



4 Sätt i röret



5 Ta bort det sista röret



6 Aktivera säkerhetsmekanismen



7 Ett hörbart klick bekräftar aktivering



8 Avfallshantering

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



Kuskvägen 8 | SE-191 62 Sollentuna, Sweden  
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90  
info@hettichlabinstrument.se

[www.hettichlabinstrument.se](http://www.hettichlabinstrument.se)




**VACUETTE®**  
**QUICKSHIELD**  
**Säkerhetshållare**

Våra innovationer  
för din säkerhet

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)

## VACUETTE® QUICKSHIELD Säkerhetshållare

VACUETTE® QUICKSHIELD säkerhetshållare är särskilt lämplig att använda vid daglig rutinmässig blodprovstagning. Skador genom nålstick förhindras med hjälp av hållaren utan att det krävs någon ändring i provtagningstekniken.

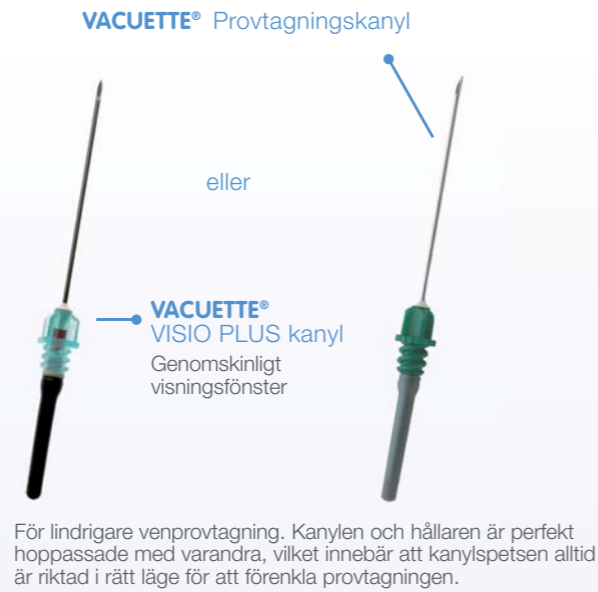

- ☞ Aktiveras med hjälp av en stabil yta och/eller med tummen.
- ☞ Bekväm aktivering med ett enhandsgrepp.
- ☞ Användarvänlig - en markering på kanylhållaren ger användaren möjlighet att välja på vilken sida VACUETTE® QUICKSHIELD säkerhetshållare ska vara placerad för optimal venprovtagning.
- ☞ Endast avsedd för användning tillsammans med VACUETTE® provtagningskanyler eller VACUETTE® VISIO PLUS kanyler.
- ☞ Innebär inte några ändringar i provtagningstekniken.
- ☞ Ger extra säkerhet eftersom fingrarna hela tiden är placerade bakom kanylspetsen.
- ☞ Kanylskyddet är förmonterat på hållaren och förblir stabilt. När kanylskyddet väl har aktiverats är det ingen risk att det lossnar.
- ☞ Ett hörbart klick bekräftar för användaren att kanylskyddet har aktiverats helt.



## VACUETTE® QUICKSHIELD kombinationsprodukter

Praktisk helt enkelt.  
VACUETTE® QUICKSHIELD Kombinationsprodukter för blodprovstagning.



### VACUETTE® QUICKSHIELD Komplet (Kombinationsprodukt med säkerhetshållare och VACUETTE® kanyl)

- ☞ Hållaren levereras med en förmonterad kanyl, i sterilt skick och i engångsförpackning
- ☞ Kanylen behöver inte skruvas i.
- ☞ En praktisk färdig lösning som sparar tid.
- ☞ Hanteringen är optimerad.

### VACUETTE® QUICKSHIELD Komplet PLUS (Kombinationsprodukt med säkerhetshållare och VACUETTE® VISIO PLUS kanyl)

- ☞ Hållaren levereras med en förmonterad nål, i sterilt skick och i engångsförpackning
- ☞ Ett genomskinligt visningsfönster gör det möjligt att kontrollera venprovtagningen visuellt.
- ☞ Kanylen behöver inte skruvas i.
- ☞ En praktisk färdig lösning som sparar tid.
- ☞ Hanteringen är optimerad.

