



Silflate

förfylld glycerinspruta

Glycerinspruta

Förfylld spruta för fyllning av kvarliggande urin- och suprapubiskatetrar av helsilikon.


Sprutan är fylld med en 10 % glycerinlösning och är sterilförpackad.

I ballongkatetrar fyllda med en glycerinlösning är förändringen av volymen i ballongen i stort sätt oförändrad efter en innetid av 12 veckor, medan i en ballong fylld med vatten har volymen minskat med 50%. Storleken på molekylerna i glycerinet gör att de inte diffunderar genom silikonväggen på samma sätt som vatten. Steriltid 5 år.


Latex- och PVC fri

Meteko art.nr.	Volym	Förp.
85 05 50	10 ml	5

Ballong fylld med glycerin

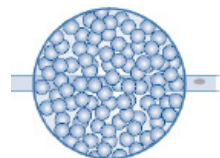

Ballong fylld med vatten

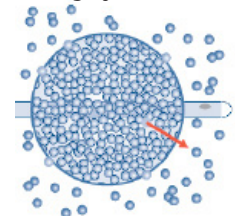

OBS ! Får endast användas på helsilikonkatetrar.

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

2015-01