


Semi-Permeabel Film<sup>1,2</sup>

Absorberande<sup>1</sup> skumdyna  
med silversulfadiazin

Sårkontaktlager med  
vidhäftande silikongel

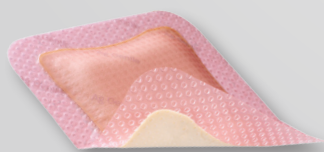

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
Ag Gentle Border

ALLEVYN® Ag Gentle Border är ett förband som ger sårbehandling med optimal vätskehanterande förmåga tack vare den unika trippelverkande teknologin som absorberar, bibehåller och släpper igenom sårvätska<sup>1-3</sup>. Resultatet blir en sårmiljö med optimal fuktbalans som främjar sårhäkning<sup>3</sup>. Tillsatsen av silversulfadiazin till förbandets hydrocellulära skumdyna ger en varaktig antimikrobiell effekt (visad *in-vitro*)<sup>3</sup>

- Utmärkt formbarhet som säkrar patientkomfort<sup>5</sup>
- En mjuk vidhäftande silikongel minimerar skada och smärta vid förbandsbyten<sup>5</sup>
- Lätt att applicera och ta bort - kan tas bort och sättas tillbaka utan att förlora sina vidhäftande egenskaper<sup>5</sup>
- Sårkontaktlager med silikongel - optimal för patienter med skör hud<sup>5</sup>
- Effekt visad *in vitro* mot ett brett spektrum av bakterier, bland annat antibiotikaresistenta bakterier som *Pseudomonas*, Meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) och Vancomycinresistent *Enterococcus* (VRE)<sup>4</sup>
- Antimikrobiell effekt som kvarstår i upp till 7 dagar *in-vitro*<sup>4</sup>

## Indikationer

ALLEVYN Ag Gentle Border är indicerat för behandling av sekundärläkande ytliga granulerande sår, svårärläta och akuta vätskande sår, full- och delhudssår som trycksår, diabetesfotsår, bensår, maligna sår, infekterade sår, operationssår, tagställen, hudflikar samt första och andra gradens brännskador

## Applicering

Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. ALLEVYN Ag Gentle Border kan klippas till för att passa hälar, armbågar och andra ställen där det är svårt att applicera förband. Använd alltid aseptisk teknik när du klipper i förbandet.

Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande hår vid behov för optimal vidhäftning.

Ta bort en av skyddsfilmerna och applicera förbandets vidhäftande sida mot huden.

Ta bort den återstående skyddsfilmerna och stryk med handen över förbandet så att det ligger jämnt över såret utan att sträckas eller veckas. Förbandets skumdyna måste täcka hela sårytan. Förbandet går att lyfta och applicera igen utan att förlora sin vidhäftande förmåga.

Om förbandet har klippts till, se till att exponerade områden av skumdynan täcks med lämplig film men var noga med att inte täcka hela förbandet.

## Bytesfrekvens

Under början av behandlingen bör ALLEVYN Ag Gentle Border kontrolleras ofta enligt gällande kliniska riktlinjer. Om förbandet används på infekterade sår ska infektionen kontrolleras och behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer. Förbandet kan lämnas på plats i upp till sju dagar, förutom i sacrum där det bör bytas inom fem dagar. Förbandet ska bytas när sårets och den omgivande hudens tillstånd motiverar det eller när sårvätska syns och närmar sig 0,5 cm från skumdynans kant. Tidpunkten för förbandsbyte bör bygga på klinisk bedömning och hänsyn bör även tas till lokala riktlinjer.

## Avlägsna förbandet

För att ta bort ALLEVYN Ag Gentle Border, lyft ett hörn av förbandet och dra långsamt tills hela förbandet har avlägsnats från såret.



## Kontraindikationer

- Använd inte förbandet på patienter med känd överkänslighet mot silversulfadiazin eller sulfonamider.
- Eftersom det är känt att sulfonamider kan orsaka kernikerus bör ALLEVYN Ag Gentle Border inte användas på gravida kvinnor nära eller vid fullgången graviditet, ammande kvinnor eller premature och nyfödda under de första levnadsmånaderna.

## Försiktighetsåtgärder

- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte ALLEVYN Ag Gentle Border med oxiderande ämnen som hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel kan bryta ner det absorberande polyuretanet i förbandet.
- Det kan hända att ALLEVYN Ag Gentle Border inte är kompatibelt med antimikrobiella medel för lokalt bruk.
- Vid klinisk infektion ersätter lokal behandling med silver inte systemisk behandling eller annan adekvat infektionsbehandling.
- Liksom alla vidhäftande produkter kan förbandet ge irritation och/eller maceration av huden runt sårområdet. Om rodnad eller överkänslighetsreaktion uppstår ska behandlingen avbrytas och sjukvårdspersonal rådfrågas.
- Observera att olämplig användning eller alltför täta förbandsbyten, särskilt på patienter med skör hud, kan leda till hudskador.
- Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler vid undersökningar som EEG (elektroencefalogram) och EKG (elektrokardiogram).
- När ALLEVYN Ag Gentle Border används på en patient under MRT (magnetresonanstomografi) kan patienten uppleva en viss värmekänsla.
- ALLEVYN Ag Gentle Border är inte kompatibelt med oljebaserade produkter som vaselin.
- Enbart ALLEVYN Ag Gentle Border bör inte användas på sårkaviter men kan användas som sekundärförband över sårkaviter.
- Liksom för alla produkter som innehåller silversulfadiazin ska följande försiktighetsåtgärder tillämpas, särskilt när förbandet används för att täcka en stor yta:
  - Iakttag försiktighet för patienter med kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion.
  - Iakttag försiktighet för personer med känd glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist.
  - Effekten av systemiskt administrerade läkemedel kan påverkas. Det gäller särskilt orala hypoglykemiläkemedel och fenytoin. För patienter som tar dessa läkemedel rekommenderar vi att halterna i blodet övervakas eftersom läkemedlets effekt kan förstärkas.
- ALLEVYN Ag Gentle Border är endast avsett för engångsbruk.

## Beställningsinformation ALLEVYN Ag Gentle Border

Artikel nr.	Storlek	Antal/fp
66800436	7.5cm x 7.5cm	10
66800437	10cm x 10cm	10
66800438	12.5cm x 12.5cm	10
66800439	17.5cm x 17.5cm	10

ALLEVYN - Proud to put people first

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management  
Smith & Nephew AB  
Kråketorsgatan 20  
431 22 Mölndal  
Sverige

www.smith-nephew.com

Varumärke från Smith & Nephew  
© Smith & Nephew mai 2015  
15-01493-SV



T +46 (0) 31 746 58 00  
F +46 (0) 31 87 05 31

## Referenser

1. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: DS/08/098/R1b, ALLEVYN Ag gentle Border Dressings Physical Properties. Carpenter S. Nov. 2008.
2. Smith & Nephew Technical Justification AG 007
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag Gentle Border and the moist wound environment (Dave Myers) April 2009.
4. Smith & Nephew Research Centre Report Ref: RR-WMP07330-10-03. The equivalence of the antimicrobial efficacies of the ALLEVYN Ag foam variants against key wound pathogens. Driffield K., Woodmansey E. 25/03/09.
5. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref: HVT050 Results from an open, prospective, randomised, within volunteer, comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S & Smith G. Dec. 2008.