



Användningsområden

Lämpligt för glas, porslin, rostfritt, aluminium, plast och känsliga material som t.ex. eloxerad och färgad aluminium. Ger ett rent och hygiensiskt resultat på sjukvårdsgods, instrument etc. Lämpligt för köksdisk där man vill ha ett icke frätande diskmedel av t.ex. arbetsmiljöskäl.

Produktgenskaper

Lågalkaliskt maskindiskmedel för diskmaskiner, disk- och spoldesinfektorer.

Produktfördelar

- Effektivt och hygieniskt diskmedel för sjukvårdsmateriel.
- Ej frätande
- Innehåller ej fosfater, NTA eller EDTA

Benämning	Fornax
Produktgrupp	Maskindiskmedel
Utseende	Klar, gulbrun vätska
Densitet (20 °C)	1155 kg/m ³
pH Koncentrat	ca 10,5
pH Brukslösning	ca 9

Doseringsanvisning

Fornax är avsett för automatisk dosering enligt maskintillverkarens anvisningar och enhetens interna rutiner.

Riktdoseringar:

Köksdisk: 0,3 -1 ml/liter diskvatten beroende på smutsbelastning.

Spoldesinfektorer: 20-80 ml per cykel

Desinfektorer: 0,10-0,90 %

Ångalstrare: 1-3 ml per 5° dH

Produkten är optimerad för mjukt och medelhårt vatten. Vid hårdare vatten ökas doseringen.

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
11525	5 liter dunk	3

Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -5°C

Säkerhetsföreskrifter

Stänk i ögonen av koncentrerad produkt ger irritation. Skölj med vatten. Undvik långvarig hudkontakt, verkar uttorkande/irriterande. Skölj med vatten. Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information. Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

