



Suprasorb® G

- gelkompres

Egenskaper:

- ✓ Ett transparent gelförband. Duschbart, skyddar mot smuts och bakterier. Då förbandet är semipermeabelt skapar det en idealisk sår-läkningsmiljö. Kompresen är steril och styckförpackad.
- ✓ Gelet i kompressen fuktar såret och ev nekrotisk vävnad upplöses och absorberas av gelen.
- ✓ Gel-kompresens struktur bibehålls under hela processen.

Indikationer:

- ✓ Gelkompresen är lämplig för ytliga nekrotiska respektive lätt vätskande sår
- ✓ Rekommenderas också för ytliga 1:a och 2:a gradens brännskador då den kylande effekten upplevs angenäm och smärtlindrande.
- ✓ Vidare kan man använda förbandet vid hudtransplantationer
- ✓ Gelet i kompressen fuktar såret så att nekrotisk vävnad upplöses och absorberas av gelen.

Kontraindikationer:

- ✓ Infekterade sår
- ✓ Djupa sår
- ✓ 3:e gradens brännskador
- ✓ Kraftigt blödande sår
- ✓ Som inlägg i djupa, smala kaviteter eller håligheter
- ✓ Patienter som är känsliga mot något av innehållsämnen i kompressen

Omlägningsfrekvens:

- ✓ Gelkompresen kan sitta upp till 3-7 dagar mellan omläggningarna

Material:

- ✓ Transparent gelförband av 70% vatten och 30% akryl.

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Lagras liggande svalt och torrt
- ✓ Rätt förvarad är produkten hållbar i 3 år från tillverkningsdatum

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt

Avfallshantering:

- ✓ Produkten hanteras som brännbart avfall

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
Särkompres			
5x6,5 cm	336 30	5	25
10x10 cm	336 31	5	25
20x20 cm	336 32	3	15

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.

Bruksanvisning

1. Sårförberedelse:

Rengör såret noggrant. Omgivande hud ska vara ren och torr.

2. Applicering av sårförbandet:

a) Välj passande storlek (2-3 cm utanför sårkanten). Vid större sår kan flera överlappande kompresser användas.

b) Dra av skyddspapperet. Sårkontaktytan är täckt med skyddspapper.

c) Lägg på Gel-kompressen på såret och fixera med folieförband, fixeringsbinda eller kompressionsförband.

3. Byte av förband:

Kompressen skall avlägsnas när den genom upptagning av sekret blivit fylld av exsudat och då är större än såret. Dock senast efter 3-7 dagar.

Försiktighetsåtgärder:

Produkten bör ej användas vid känd allergi mot en eller flera av de i produkten ingående komponenterna.

För vidare information, var god se bipacksedel.