




# PRODUKTBLAD

Synergetics

## IRISHAKAR

Utgåva 1  
2006-09-05

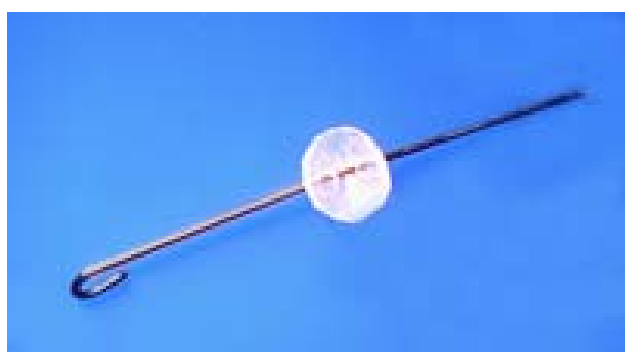

Irishakar eller Irisretraktorer används i de flesta fall för att vidga en liten iris. Många använder dem även för att hänga upp kapseln för att förhindra att den "sjunker ihop"

### Handhavande och förvaring

BENÄMNING	Flexibel Irishake/irisretraktor Artikelnummer: 40.02-6
UTFORMNING/ MATERIAL	Synergetics Flexibla hake är tillverkad i nylonsuturmateriel med stopper gjord av silikon. Varken stopper eller hake irriterar vävnad.
FUNKTION	Användningsområden är tex. vid små pupiller som ej låter sig dilateras, vid lösa zonulartråder och hög myopi.
KVALITET/ SÄKERHET	Hakanra är sterila och för engångsbruk. I övrigt se under utformning.
FÖRPACKNING	Avdelningsförpackning/Transportförpackning består av 6 stycken sterilförpackade tuber med 5 hakar i varje tub. Förpackningskonstruktionen gör att hakarna är mycket lätta att komma åt och att de ej sprätter omkring.
ÖVRIGT	Produkten får enbart användas av utbildad ögonkirurg. Tillverkad av Synergetics Inc, USA. CE-Märkt enligt MDD

- Förvaras i rumstemperatur
- Skydda från fukt och värme
- Använd ej efter utgångsdatum
- När tuben tagits ur sin sterilförpackning, placera tuben så att hakarna är uppåt.
- Håll i ena änden av tuben och för försiktigt den genomskinliga plastylsan åt sidan tills tuben är öppen.
- Använd pincett för att plocka upp retraktorena

Årgus Medicinteknik AB  
Trädgårdsgatan 10  
392 35 KALMAR  
Tel: +46-480-49 12 80  
Fax: +46-480-49 13 80

E-post: [info@argusmedicinteknik.se](mailto:info@argusmedicinteknik.se)  
[www.argusmedicinteknik.se](http://www.argusmedicinteknik.se)