

TENA®

Produktfaktablad TENA Slip Active Fit

Användningsområde

TENA Slip Active Fit är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt allt-i-ett skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. Skyddet finns i tre absorptionsnivåer (Plus, Maxi och Ultima) och tillåter individanpassning tack vare ett stort antal storlekar.

Fixering med tejp för
enkel hantering

Midjeelastik för
en säker passform

Spridningsskiktet FeelDry™
kaplar snabbt in urin och
håller huden torr

Stabil och mjuk
benelastik för god och
säker passform

Diskret våtindikator

Läckagebarriär för hög
säkerhet

Odour Neutralizer för neutraliserande
effekt på oönskad lukt



TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

www.tena.nu

Produktfaktablad TENA Slip Active Fit

Produktegenskaper


TENA Slip Active Fit är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Vätskeavvisande läckagebarriärer och midjeelastik bak hjälper till att förhindra läckage.

Skyddet har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt.

Enkel hantering med tejp underlättar fixering. Vätindikator och tydlig färgmarkering (visar absorptionsnivå) finns för hjälp vid val av rätt produkt.

| TENA ProSkin Slip Active Fit | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--|------------------|
| Uppsugningsnivå/ storlek | Midja/höft cm | Längd cm | Vikt g | Antal/påse st | Antal/kart st | Antal/kart pall | Praktisk absorption | ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet | Essity Art.nr |
| Plus | | | | | | | | | |
| Small | 55-85 | 71 | 71 | 30 | 90 | 16 | 513 | 1538 | 71 05 49 |
| Medium | 70-120 | 82 | 93 | 30 | 90 | 16 | 734 | 2201 | 71 06 49 |
| Large | 90-145 | 100 | 110 | 30 | 90 | 12 | 793 | 2378 | 71 07 49 |
| Maxi | | | | | | | | | |
| Small | 55-85 | 71 | 90 | 24 | 72 | 16 | 670 | 2010 | 71 08 49 |
| Medium | 70-120 | 82 | 133 | 24 | 72 | 16 | 1051 | 3152 | 71 09 49 |
| Large | 90-145 | 100 | 164 | 22 | 72 | 12 | 1259 | 3776 | 71 10 49 |
| Ultima | | | | | | | | | |
| Medium | 70-120 | 82 | 155 | 21 | 63 | 16 | 1246 | 3739 | 71 07 21 |
| Large | 90-145 | 100 | 186 | 21 | 63 | 12 | 1448 | 4345 | 71 08 21 |

Användarinstruktion

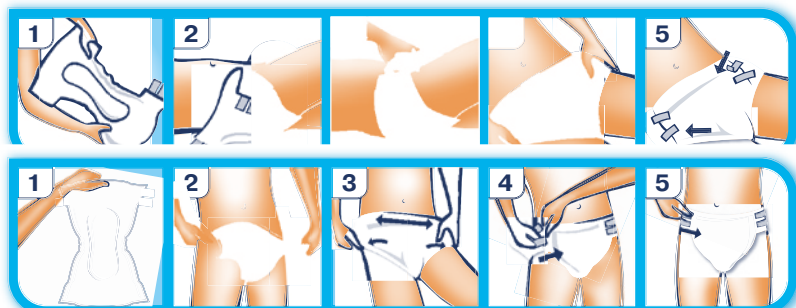

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.

Produktfaktablad TENA Slip Active Fit

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Polyethylene

Funktion: Ökad bekvämlighet

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORPTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

MIDJEELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Passform, komfort, läckagesäkerhet

BENELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Passform och läckagesäkerhet

BARRIÄRELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Bidra till läckagesäkerhet

FASTSÄTTNING:

Material: Polypropylene adhesive

Funktion: Förslutning av produkt och passform

För samtliga TENA Slip Active Fit skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA,
an Essity brand