

DAGLIG YTDESINFEKTION & SLUTSTÄD SANERING MED SPORICIDAL EFFEKT

LifeCleans breda microbiocidala lösningar är effektiva mot: Clostridium Difficile sporer, Calicivirus och multiresistenta bakterier inom 60 sekunder

Daglig Ytdesinfektion och Slutstäd Sanering är båda ytdesinfektion med brett användningsområde. Produkterna är klordioxidbaserade, och är godkänd enligt EN-standarder för bakterier, mykobakterier, multiresistenta bakterier, sporer, virus, svamp och jäst. LifeCleans produkter visar total effekt mot dessa.

Vetenskapliga studier har genomförts av hygienöverläkare Torbjörn Norén vid Universitetssjukhuset Örebro. Studien visar att LifeClean har överlägsen sporavdödning på Clostridium Difficile redan vid korta inverkningsstider.

Fördelar med LifeClean

- ✓ **Bred microbiocidal effekt**
LifeClean är kliniskt bevisad att ha en bred microbiocidal effekt med total avdödning inom loppet av 60 sekunder.
- ✓ **Full effekt inom 60 sekunder**
Den extremt korta inverkningsstiden underlättar användarens arbete.
- ✓ **Skonsammare för miljön**
LifeClean är baserad på den sedan länge beprövade kemikalien klordioxid. LifeCleans formel gör produkten skonsammare för såväl människa som miljö, eftersom klordioxid till skillnad mot klor inte reagerar lika lätt med andra ämnen och därmed inte bildar några giftiga föreningar. Medlet kan spolas ner i avloppet.
- ✓ **Mildare doft**
LifeClean har en mild doft vilket är tacksamt för både användare som patient.
- ✓ **2 i 1 direkt ur flaskan**
LifeClean är redo att användas direkt ur flaskan. Detta gör också att produkten blir säkrare och mer användarvänlig

Rekommenderade städinstruktioner

1. Häll utspädd LifeClean produkt på städutrustningen. Applicera på avsedd yta, rekommenderas små ytor åt gången.
2. Skrubba ytan genom noggrann mekanisk bearbetning.
3. Använd städutrustning så som moppar, städtrasor samt skyddsutrustning enligt gällande lokala föreskrifter.
4. Förslut LifeClean-flaskan, ange öppningsdag. Öppnad flaska är hållbar en vecka från öppningsdag. Mindre mängd överbliven vätska kan hållas i avlopp och förpackning lämnas för återvinning.
5. 1 liter LifeClean räcker upp till 25 kvm yta.



Daglig Ytdesinfektion

För dagligt bruk på ytor och för att uppfylla vårdinrättningarnas basala hygienrutiner. Med bactericidal, virucidal och sporicida effekt.

Slutstäd & Sanering

Med total sporicidal, bactericidal och virucidal avdödning.

Art. nr.	Benämning	Storlek
16100	Slutstäd Sanering	1 l x 6
16200	Daglig Ytdesinfektion	1 l x 6
16220	Daglig Ytdesinfektion	25 l
16236	Daglig Ytdesinfektion	IBC-600 l
16238	Daglig Ytdesinfektion	IBC-800 l

Teknisk data

Dosering	Färdig att använda, 2 i 1 direkt i flaskan	
Beståndsdelar	Klördioxid <0,2 %	
Färg och form	Ljsgul vätska	
Lukt	Svag klorklukt	
Rengöringseffekt	God	
Brandrisk	Produkten är ej brandfarlig	
Hållbarhet och lagring	Hållbar i 6 mån, 12 månader i kyl. Förvaras i originalförpackning svalt och ej i direkt solljus. Öppnad flaska hållbar i en vecka.	
Farosymboler	Inga. Produkterna är inte klassificerade som farliga enligt 1272/2008 och 1999/45/EG	
Daglig Ytdesinfektion	Klördioxid innehåll	0,4–0,2 g / kg
	pH	1,8–2,0
	Amfotära tensider	<0,2 %
Slutstäd Sanering	Klördioxid innehåll	0,8–0,4 g / kg
	pH	1,5–1,8
	Amfotära tensider	<0,2 %



Genomförda standarder

Sporicidal	EN13697	Bactillus Subtilis
	EN13704	Clostridium Difficile

Carriertester har utförts vid Universitetssjukhuset Örebro. Rapport kan efterfrågas.

Virucidal	EN14476	Poliavirus, Adenovirus Murine Norovirus
Bactericidal	EN13727	Staph. Aureus, Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa

Mycobacteriacidal	EN14563	Mycobacteria avium Mycobacteria terrae
	EN14348	Mycobacteria avium Mycobacteria terrae

Fungicidal/Yeasticidal	EN13624	Candida albicans Aspergillus Braciliensis
	EN14562	Candida albicans Aspergillus Braciliensis

Materialkompatibilitet:

Exempel på material så som: rostfritt stål, galvat stål, aluminium, trä, glas, lackade ytor, Polypropen, Polyeten, PET, vinylgolv, PVC och gummi.



LifeClean International AB är ett svenskt företag med internationell inriktning som bedriver forskning, utveckling och produktion inom spor-, bakterie- och virusdödande produkter. Alla LifeCleans produkter tillverkas i Sverige.

LifeClean har som vision att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människor och djurs hälsa globalt.

Läs mer om LifeClean på: www.partnermed.se

PartnerMed

Adress: Box 25, 452 24 Strömstad
Tlf: +46 738 487 300 / +46 706 596 602
Mail: info@partnermed.se