



Prolance säkerhetslansett - finns med blad eller nål

Välj rätt lansett för kapillärprovtagningens ändamål.

1. För att avlägsna skyddstaven, vrid och dra samtidigt (ett varv).

2. Placera lansettkanten längs med nageln (ca 2 mm ifrån). Tryck på den färgade knappen.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Prolance är enkel och säker för både personal och patient
- Prolance är ergonomisk, snabb och enkel att använda
- Prolance kräver minimal instruktion
- Prolance är en engångsprodukt
- Nålen/bladet fjädrar tillbaka efter användning

G står för Gauge. Gauge är ett mått på nålens diameter. Ju högre Gauge ju finare, tunnare nål är det.

Orderinformation

| Art.nr. | Färg | Namn | Nålstorlek | Stickdjup | St./förp | Trp förp. |
|---------|---------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 7609 | Rosa | Paediatric | Blad | 1,2 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7620 | Lila | Max Flow | Blad | 1,6 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7594 | Grön | Normal Flow | 21G | 1,8 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7604 | Blå | Micro Flow | 28G | 1,6 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7599 | Mörkblå | Low Flow | 25 G | 1,4 mm | 200 st | 10 boxar |

Prolance säkerhetslansett finns med blad eller nål Välj rätt lansett för kapillärprovtagningens ändamål



EXEMPEL PÅ OLIKA FLÖDEN VID PROVTAGNING MED FÖLJANDE SÄKERHETSLANSETTER:

- Micro Flow, ljusblå nål, djup 1.6 mm 28G är mycket skonsam och ger ett litet flöde, räcker oftast till t.ex. blodsocker, HbA1c och CRP.
- Low Flow, mörkblå nål, djup 1,4 mm 25G används om man önskar flöde > micro flöde och < normal Flöde.
- Normal Flow, grön nål, djup 1.8 mm 21G, är mycket väl lämpad till Hb, med ett flöde på ca. 100 – 150 µL.
- Max Flow, lila blad, djup 1.6 mm. Bör ge ett flöde på ca. 400 µL eller mer. Med fördel lämpad för PK - prover, microrör mm.
- Paediatric, rosa blad, djup 1.2 mm är ett alternativ när man tar kapillärt på små barn, i häl eller finger, i nödfall stortån, dock ej prematurer. Flöde på ca. 200 µL eller mer. Flödet beror mycket på om barnets provtagningsställe är uppvärmt eller ej.

G står för Gauge. Gauge är ett mått på nålens diameter. Ju högre Gauge ju finare, tunnare nål är det.

Orderinformation

| Art.nr. | Färg | Namn | Nålstorlek | Stickdjup | St./förp | Trp förp. |
|---------|---------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 7609 | Rosa | Paediatric | Blad | 1,2 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7620 | Lila | Max Flow | Blad | 1,6 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7594 | Grön | Normal Flow | 21G | 1,8 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7604 | Blå | Micro Flow | 28G | 1,6 mm | 200 st | 10 boxar |
| 7599 | Mörkblå | Low Flow | 25 G | 1,4 mm | 200 st | 10 boxar |