


# Produktfaktablad TENA Men Protective Shield Extra Light

## Användningsområde

TENA Men Protective Shield Extra Light är ett läckagesäkert, bekvämt och diskret droppskydd med en design utformad efter den manliga anatomin. Extra tunt, bara 3 mm, och speciellt framtaget för droppläckage.

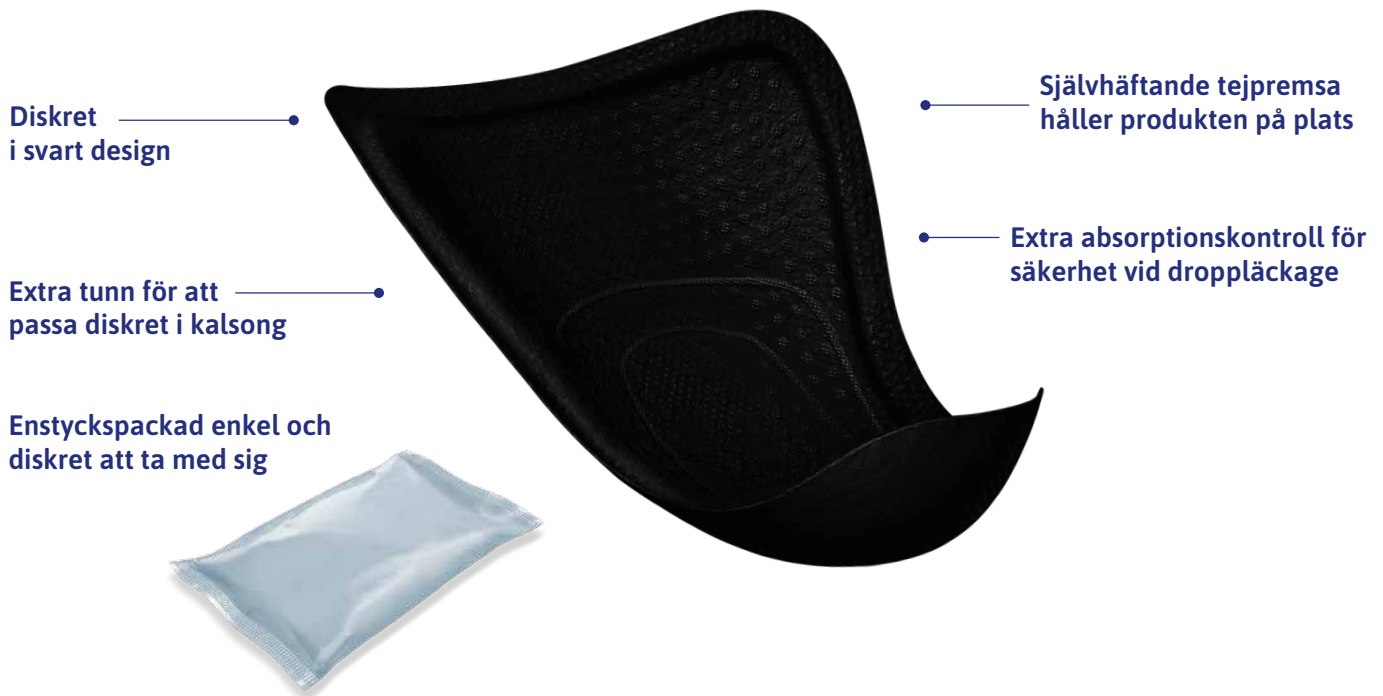

## Produktegenskaper

TENA Men Protective Shield Extra Light fixeras med hjälp av tejp på produktens baksida i tätt åtsittande kalsonger. Fixeringstejpen håller skyddet säkert på plats utan att lämna häftrester på textilier. Tejpens skyddspapper är märkt med produktnamn/storlek och illustrationer som visar vilken del av skyddet som är uppåt och hur det fixeras.

Konsumentundersökningar visar att män i hög utsträckning ofta använder färgade/mönstrade kalsonger och efterfrågar ett diskret droppskydd i mörk färg. TENA Men Protective Shield Extra Light är svart och enstycksförpackad.

TENA Men Protective Shield Extra Light har Odour Control™ som hjälper till att förhindra oönskad lukt. Textilliknande andningsbara material runt hela produkten och andningsbart spärrskikt ger ökad komfort.



**TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.**

# Produktfaktablad TENA Men Protective Shield Extra Light

TENA Men								
Uppsugningsnivå/storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Apsorptionskapacitet	Essity Art.nr
Protective Shield Extra Light	18	13,8	6,7	14	112	54 ml	162 ml	75 05 35



Säker absorptionszon som effektivt låser in läckage



Anpassad efter mannens kropp med bekväm kupform



Enstycksförpackad



Skyddar mot läckage, lukt och fukt



Diskret med extra tunn design



Sitter på plats tack vare självhäftande remsa

## Användarinstruktion



Ta ut skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det. Dra bort skyddspappret på baksidan. Placera skyddet över penis och pung och fäst i åtsittande kalsong eller fixeringsbyxa. Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

# Produktfaktablad TENA Men Protective Shield Extra Light

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven; Polypropylen (PP)

Funktion: Hålla huden torr, mjukhet

### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt och motverka att urin tränger tillbaka upp till ytan

### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För samtliga TENA Men gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)