

# Getinge Assured

## AdvaTec Bowie-Dick Test Pack 134°C

### Produktspecifikation

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

Getinge Assured AdvaTec Bowie-Dick Test Pack 134°C används för daglig övervakning av ångautoklaver med förvakuum som körs vid 134 °C. Testpaketet är förpackat i en lättöppnad ask och utvecklat för att uppfylla kraven i SS-EN ISO 11140-4. Lämpar sig för användning i Getinge Turbo- och GSS-autoklaver. En Bowie-Dick-testcykel för sjukhus som följer specifikationerna i SS-EN 285 skiljer sig från den testcykel som anges i SS-EN ISO 11140-4 och måste återspegla rutincykeln hos en sjukhusångautoklav.

För att förbigå skillnaderna mellan laborietestcykler och Bowie-Dick-testcykler för sjukhus tillåter EN 285-standarden att platåtiden varierar. Följaktligen är Getinges Bowie-Dick-testcykler utformade med en platåtid på mindre än 3,5 minuter för att de ska följa båda standarderna. Denna Getinge Assured-produkt är testad och kontrollerad för ett likvärdigt och godkänt resultat vad gäller både transatmosfäriska och superatmosfäriska testcykler i SS-EN ISO 11140-4 och Getinge Bowie-Dick-cykler så som de definieras i EN 285.



## Funktioner

Om autoklaven fungerar korrekt visar indikatorgrafiken en enhetlig färgförändring från blå till svart över hela bilden på indikatorn. När det förekommer alltför stor mängd restluft eller icke kondenserbara gaser visar indikatorgrafiken ett felaktigt resultat. Vid typiska felaktigheter blir det blått kvar i mitten eller en ljusare nyans av svart i mitten av arket jämfört med färgen i kanten av arket.

## Fysiska Kännetecken

Laminering: Indikatorark, laminerat på översidan.  
Mått: L 104 mm x B 65 mm  
Paket mått: L 105 mm x B 66 mm x D 12 mm  
Förpackning: 1 låda med 30 paket

## Miljömässiga Begränsningar

lagring: vid rumstemperatur 10–38 °C, 10–60 % relativ luftfuktighet. Skydda mot fukt och alltför hög luftfuktighet. Förvara exponerade indikatorark mörkt.

Customer

Reference

---

Hållbarhetstid

36 månader. Bäst-före-datum är tryckt på produktförpackningen.

---

Standardklassificering

SS-EN ISO 11140-4, Typ 2-indikatorer för användning i specifika tester och EN 285.1.

---

Beställningsinformation

**Getinge Assured**

**Ordernummer**

AdvaTec Bowie-Dick Test  
Pack 134°C

504225100

---

---

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

Getinge Infection Control AB  
P O Box 69, SE-305 05 Getinge, Sweden  
Phone: +46 10 335 00 00  
info@getinge.com  
  
www.getinge.com

---

**GETINGE GROUP**

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge and Maquet. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management solutions. Getinge provides solutions for infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions, interventional cardiology and intensive care.

---