

Cuticell® Contact – användningsområden

Sårkontaktsslayer av silikon är lämpliga för följande sårtyper:

- Skärsår
- Skrubbsår
- Brännskador
- Kroniska sår (tillsammans med absorberande ytterförband)
- Rivsår
- Blåsor
- Hudlesioner
- Även lämpliga som hudskydd (t.ex. efter strålbehandling)
- Kan användas i kombination med antiseptiska medel
- Lämpliga för särskilt känslig och ömtålig hud

Fördelar i sammanfattning

Cuticell® Contact ger en mängd olika fördelar för användare och patienter:

- Färre förbandsbyten – kostnadseffektivt
- Atraumatiska förbandsbyten
- Fastnar inte på handskar
- Ingen ansamling av sårvätska
- Minimerad risk för macerationer
- Enkel sårinspektion
- Extra god flexibilitet och följsamhet
- Smidig applicering

Cuticell® Contact är indicerat för följande sår:

- Sår djup**  Ytligt
- Sårstadier**  Fibrinbelagt (smetigt)  Granulation  Epitelisering
- Sårvätska**  Liten till måttlig mängd  Måttlig till riklig mängd  Riklig till mycket riklig mängd



Beställningsinformation:

Storlek	Artikelnr.	Antal/Avd. fp	Antal/trp fp
5 cm × 7,5 cm	7268000	5	150
7,5 cm × 10 cm	7268001	5	100
10 cm × 18 cm	7268002	5	100
15 cm × 25 cm	7268003	5	50

Cuticell® Contact

Sårkontaktsslayer av silikon



- Mycket flexibelt
- Atraumatiskt
- Häfta på ena sidan

Cuticell® Contact – mycket god lindrande effekt på sår

Cuticell® Contact är ett mycket följsamt sårkontaktlager av silikon med en perforerad och transparent struktur. Det gör **Cuticell® Contact** till ett effektivt innerförband för modern sårbehandling.

Skonsamt för såret redan från början

När **Cuticell® Contact** väl har applicerats kan det sitta kvar i flera dagar för att skydda såret. Sekret kan lätt passera genom perforeringarna och det är minimal risk för inväxt av vävnad. Eftersom häftan bara sitter på kontaktytan mot såret, kan ytterförband enkelt bytas utan att trauma uppstår på såret.

- Ostörd läkning
- Smärtfria, atraumatiska förbandsbyten
- Förbättrad patientföljsamhet
- Kostnadseffektivt



Transparent

Cuticell® Contact är mycket transparent, vilket gör det lätt att applicera.

- Exakt applicering
- Enkel sårinspektion utan att silikonförbandet behöver tas bort

Perforerad struktur

Upp till tio perforeringar per cm² gör att även sårvätska med hög viskositet lätt kan passera igenom **Cuticell® Contact**.

- För sår som vätskar lite till kraftigt
- Hjälper till att förhindra maceration

Elastiskt

Kombinationen av en tunn PU-film och silikonbeläggningen på endast en sida gör att **Cuticell® Contact** är väldigt flexibelt och följsamt.

- Hög bärkomfort även på områden med skarpa konturer
- Glider inte



Siltec-teknik

Cuticell® Contact bygger på **Siltec-teknik**. Sårkontaktlagret med silikonbeläggning fäster bara på torr, frisk hud och ger därför en mycket skonsam vidhäftning.


- Optimalt skydd av huden och såret
- Säker vidhäftning utan att förbandet fastnar i sårbedden
- Vävnadsvänlig och smärtfri borttagning
- Skonsam borttagning utan rester
- Låg allergirisk

Enkel att applicera




Steg 1:

Ta bort den överlappande skyddsfilm från förbandets häftsida.

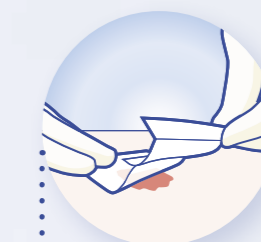

Steg 2:

Applicera **Cuticell® Contact** med häftsidan nedåt och se till att sårkanten överlappas med 2 cm.

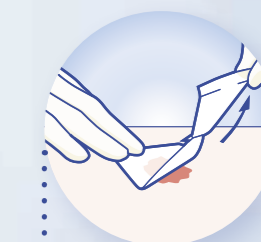

Steg 3:

Ta nu bort den andra skyddsfilm från förbandet och jämna ut det mjukt med handen.

Cuticell® Contact kan kombineras med absorberande ytterförband:

- Cutisorb®/Cutisorb® Ultra (absorberande kompress)
- Cutisoft® (kompress i non-woven-material)
- Cutisoft® Cotton (gaskompress)

För fixering rekommenderas följande produkter:

- Elastomull®
- Elastomull® haft/colour
- Fixomull® stretch

