


# Intrafix<sup>®</sup> SafeSet

Ger alla avdelningar den där extra säkerheten och ökar samtidigt effektiviteten



Intravenös vätsketillförsel

# Hantera dagens utmaningar...

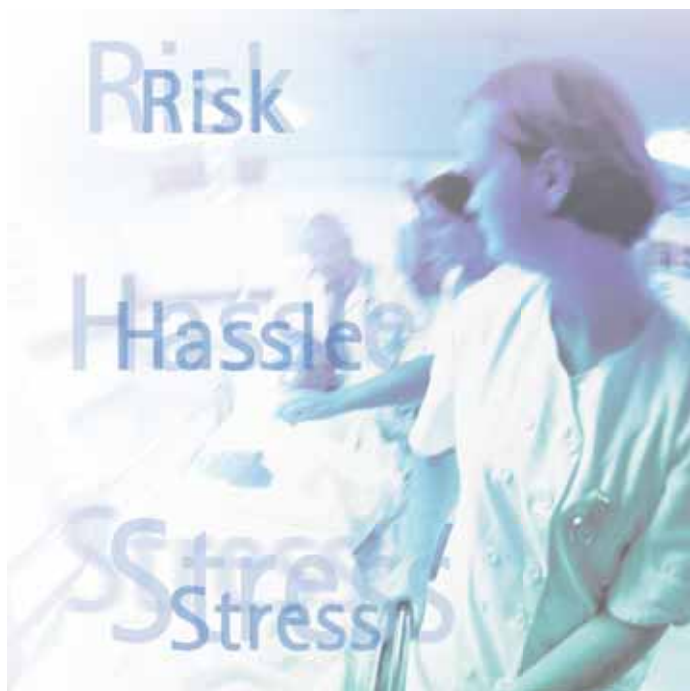


## Du är ofta stressad och önskar att du hade fler än två händer

Det är ditt ansvar att ha allt under kontroll. Dina arbetsuppgifter är komplexa, som behandlingsregimer med många olika läkemedel och komplicerade infusionsystem. Och idag har tiden blivit en ovärderlig handelsvara. Timme efter timme, dag efter dag är det din uppgift att förbereda, fylla, övervaka och ändra oräkneliga infusioner. Ditt mål är att ge den bästa vård en människa kan ge utan att någonsin göra ett misstag – inte ens i stressiga situationer. Det är därför du behöver ett infusionsaggregat som gör det möjligt för dig att hantera dessa utmaningar.

## Intrafix® SafeSet – det första infusionsaggregatet med AirStop och PrimeStop


Tack vare droppkammarens AirStop behöver du inte längre bli förskräckt när du ser att en infusionsbehållare håller på att tömmas och du behöver inte slösa tid och energi på att springa fram och tillbaka på grund av oroliga patienter.

Tack vare PrimeStop vid patientanslutningen kan du nu samtidigt förbereda flera infusioner, snabbare och mer hygieniskt än någonsin tidigare. Du får genast fria händer att förbereda nästa infusion.

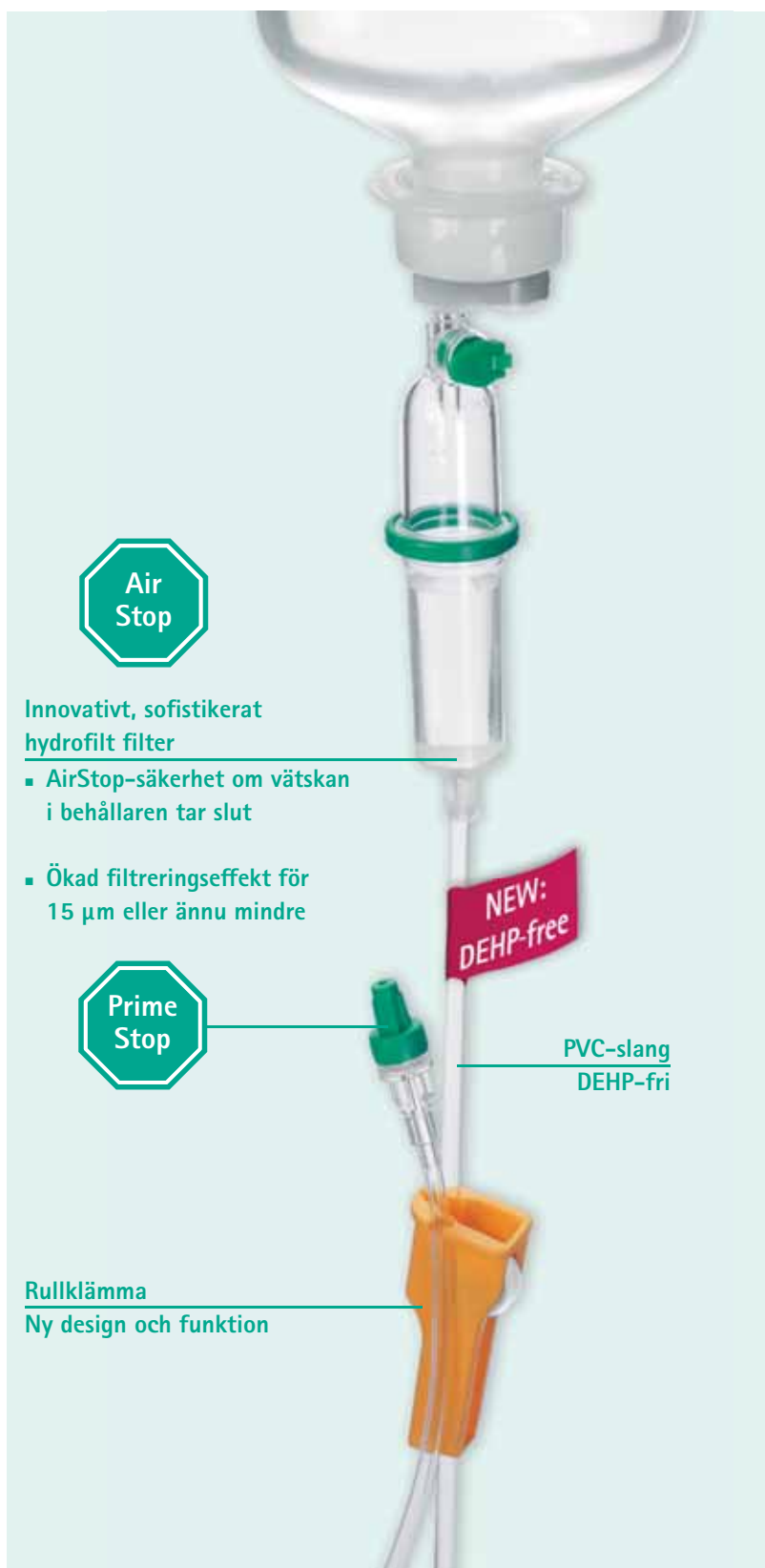

# ...på det säkraste och bekvämaste sättet

## Air Stop

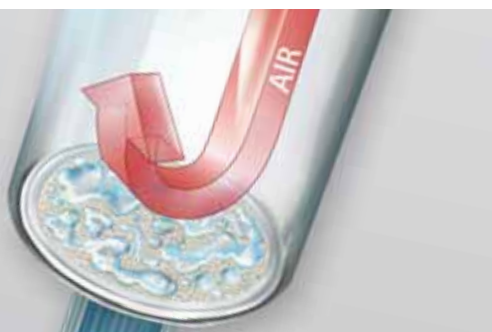

Den innovativa AirStop-funktionen bidrar till att förhindra infusion av luft och håller slangen fylld

När infusionsbehållaren är tom upprätthåller AirStop en konstant vätskenivå. Ingen luft kan nå fram till patienten.

### Hydrofilt filter – filtret med två fördelar

Ett unikt lufttätt filtermembran fungerar som barriär och skyddar mot infusion av luft samtidigt som det fångar upp partiklar som är 15 µm eller ännu mindre. AirStop effektiviserar bytet av infusionsbehållare genom färre arbetsmoment, som att öppna systemet, riskfri återanslutning av infusionsaggregatet, mindre stress och större lugn på avdelningen.

## Prime Stop



### Skyddshylsa

En ny skyddshylsa med ett hydrofobt membran stoppar och skyddar mot kontaminering.

### PrimeStop automatiserar fyllningen och gör slut på onödig läckage

- PrimeStop säkerställer att slangen fylls automatiskt.
- Inget mer droppande av infusionsvätska på händer, golv eller sängkläder.
- Nu kan du samtidigt förbereda flera infusioner snabbare och mer hygieniskt än någonsin tidigare.
- PrimeStop håller systemet slutet tills det ansluts till patienten.
- Förebygger kontamination effektivt.

## Fler smarta funktioner



### Enkel inställning av flödes hastighet

Rullklämma med ny form och funktion: bekväm att hålla och hantera, noggrannare inställning av droptakten. Lättare att rulla och med ögonblicklig justering av droptakten. Den stora rullklämman ger ett säkrare grepp.



### Säkrare kassering med hållare för "spiken"

Hållaren för "spiken" är en nyhet som skyddar personalen från stickskador efter användning.



### Bekväm hållare för slangen


Vid fyllning kan patientanslutningen och slangen fästas i urtaget på sidan. Här sitter den stadigt tills anslutning sker.



### Luerlockfattning för säker anslutning

Anslut patientkopplingen och vrid om tätt. Förhindrar oavsiktlig särkoppling.

Alla designdetaljer uppfyller ISO 8534-4/8

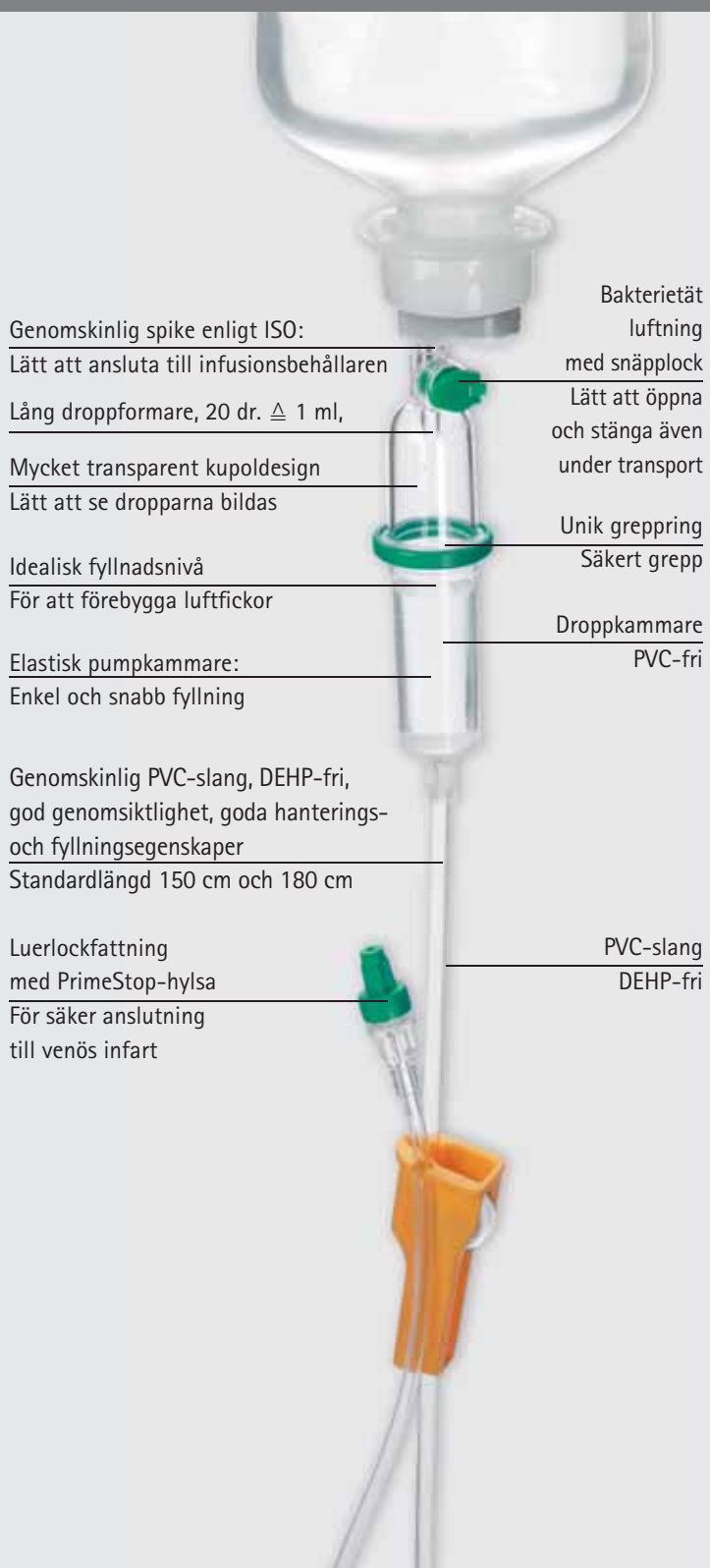

Genomskinlig spike enligt ISO:

Lätt att ansluta till infusionsbehållaren

Lång droppformare, 20 dr.  $\triangle$  1 ml,

Mycket transparent kupoldesign

Lätt att se dropparna bildas

Idealisk fyllnadsnivå

För att förebygga luftfickor

Elastisk pumpkammare:

Enkel och snabb fyllning

Genomskinlig PVC-slang, DEHP-fri,  
god genomsiktighet, goda hanterings-  
och fyllningsegenskaper

Standardlängd 150 cm och 180 cm

Luerlockfattning

med PrimeStop-hylsa

För säker anslutning

till venös infart

Bakterietät

luftning

med snäpplock

Lätt att öppna

och stänga även

under transport

Unik greppring

Säkert grepp

Droppkammare

PVC-fri

PVC-slang

DEHP-fri



### **Intrafix® SafeSet:**

#### **Bästa standarden för infusionsaggregat**

- Bidrar till att hindra infusion av luft och infusionsrelaterade infektioner
- Droptakten lämnas oförändrad vid byte av infusionsbehållare
- Minskar arbetsbelastningen märkbart
- Sparar tid och pengar
- Säker fyllning – säkerställer slutet system
- Infusionslangor med DEHT, den nya generationen av mjukgörare utan ftalater. Patientsäkerheten först
- Ny rullklämma – noggrannare, flexibla kontroll av flödes hastigheten. Lättare att välja droptakt
- Ett infusionsaggregat med unika egenskaper som passar både till glasflaskor och plastbehållare. Testad upp till 2 bar

# Välj ditt bästa Intrafix® SafeSet-alternativ

## Intrafix® SafeSet:

	Specifikation	Slanglängd cm	Artikelnummer
<b>Intrafix® SafeSet</b>  <b>DEHP-/ Latexfritt</b>	Standard	180	406 3000
	Standard	230	406 3003
	Backventil	180	406 3001
	NTP (PVC-fri)	180	406 3002
	NTP (PVC-fri)	320	418 7890
	Eurofix® injektionsport	180	406 3005
	Safeflow 2-vägsventil Y-gren	210	406 3004
	Discofix 3 v-kran 25cm	220	406 3006



### Modern infusionsbehandling med Intrafix® SafeSet infusionsaggregat

- Bekvämare
- Säkrare
- Bättre prestanda

En jämförande studie<sup>1)</sup> mot konventionella infusionsaggregat har visat att Intrafix® SafeSet förkortar den tid som krävs för att förbereda en infusion och sänker relaterade kostnader.

1) Frei A., Profitability analysis of IntrafixR SafeSet when used in peripheral venous gravity infusions (2003, ingiven för publicering).

2) Neue Produkte zur Qualitätssicherung im Pflegebereich – „Die Schwester/Der Pfleger“, Vol. 45, Jahrgang 10/06.

3) Evaluacion de un nuevo equipo de infusion. Revista de enfermeria ROL, Vol. 31 No 9, Septiembre 2008